

再使用禁止

セロックス EMS 止血ガーゼ

【警告】

1. 手術用には使用しないこと
2. 腹部創や圧迫に適さない創傷には使用しないこと
[創傷の悪化を引き起こす可能性がある]
3. 使用開始から 72 時間以内に創傷部位から取り除くこと

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止


【形状・構造及び原理】

1. 外観

1.1. 外装



本体

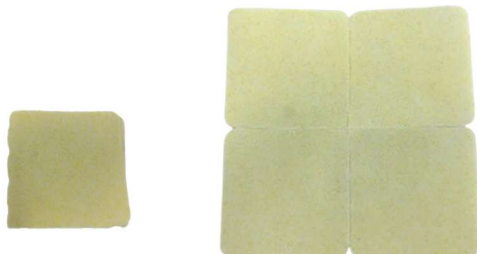

収納時

展開時

2. 寸法

2.1. 外装


パッケージ：約 17.0 x 16.0 x 0.5 cm

2.2. 本体

収納時：10.2 x 10.2 x 0.4 cm

展開時：20.3 x 20.3 x 0.1 cm

3. 構造

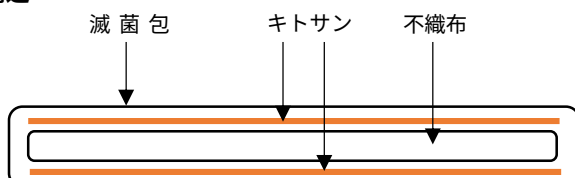

4. 原材料

ビスコース、ポリオレフィン、キトサン

5. 原理

本品は、合成繊維から成る正方形型の不織布ガーゼである。正方形のガーゼに十字線が入っており、その線に沿って折り畳まれている。1 枚の約 20 x 20 cm のガーゼパッドとしても、4 枚の約 10 x 10 cm の小さなガーゼパッドとしても使用できる。

Chito-R 増強キトサンがガーゼに練り込まれており、出血面（部位）を覆うと、プラス電荷のキトサンにマイナス電荷の赤血球および血小板を引き寄せ、血栓を形成し止血する。また、赤血球と血小板が不織布ガーゼに凝固するため、再出血を防ぐ。本品の原理は人体の止血機構に依存しない。

【使用目的又は効果】

局所出血部位、外傷等の出血の抑制、液の吸収のために用いる。

【使用方法】

1. 出血箇所を特定し、直接圧迫する。必要に応じて余分な血液を拭き取る。
2. パッケージを開封し、本品を取り出す。
3. 本品を出血部位全体が覆われるように貼る。本品は出血源に直接適用する必要がある。
出血源が創傷面の下にある場合は、創傷面が皮膚の高さより高くなるまで本品を詰める。本品が血液で飽和した場合は、追加の本品か一般的なガーゼを使用する。
4. 出血の程度に応じて、1~3 分間傷口を直接強く圧迫する。
出血が続く場合は、出血が止まるまで更に圧迫する。
5. 創傷への圧力を維持するために包帯で固定する。この際に外装を包帯に挟み込み、本品が使用されたことを分かるようにしておく。
6. 負傷者を次の治療段階に移す。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 一時的な外用としてのみ使用すること。
- (2) 目の処置に使用しないこと。万一目に入った場合は、十分な水で 5 分以上洗浄すること。
- (3) 本品を取り除く際は、滅菌生理食塩水で創部に残留した顆粒を十分に洗浄・除去すること。
- (4) 包装に破損や汚染がある場合は、滅菌性が失われ感染のリスクがあるため使用しないこと。
- (5) 本品の製造工程において、甲殻類アレルギーの原因となるたんぱく質（トロポミオシン）が除去されたキトサン

が使用されている。

2. 不具合・有害事象

発生の可能性があり、治療が必要とされる有害事象を以下に示すが、これに限られるものではない。

➤ 有害事象

炎症、発熱

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期限

*ガンマ線滅菌 有効期限 3 年又は 5 年（外装に記載）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル

*神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 14 番地 20

電話：04 -470-9041（代） FAX：045-470-9043

2. 製造業者

MedTrade Products Limited.（英国）