

医療用品 04 整形用品
一般的医療機器 救急絆創膏（34864000）

再使用禁止

フォックスチェストシール

【警告】

- プレホスピタル（病院前救護）における緊張性気胸の発生予防を目的として使用すること。〔本品は応急処置用の救急絆創膏であり、根本的な治療を行うものではないため。〕
- 負傷者の体重、衣服、毛布等によって、本品（特に通気弁部分）が塞がれる位置に貼付・固定しないこと。〔通気機能が阻害され、致死的な緊張性気胸を誘発、又は悪化させるおそれがあるため。〕

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理】

1. 外観

1.1. 弁付き



1.2. 弁無し



2. 寸法

型式	パッケージサイズ(cm)	本体サイズ(cm)
弁付き	16 x 16 x 0.3	13.3 x 13 x 0.1
弁無し	16 x 16 x 0.3	13.3 x 13 x 0.1

3. 原材料

部位	材質
一方弁	ポリエチレン樹脂
台座、弁無し	ポリエチレン樹脂

4. 枚数

型式	1 包装あたりの入数(枚)
弁付き	1
弁無し	2

5. 原理

本品は、緊張性気胸防止のために胸部に貼り付けて使用する。穿通創が考えられる場合でも、一方弁により空気の排出ができ、外気の流入を防ぐ。

【使用目的又は効果】

身体の部位に用いる、接着剤を付した、プラスチック製等の絆創膏を言う。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法】

- 傷の周りの皮膚から汚れや液体を拭き取る。
- パッケージを開封し、本品を取り出す。
- タブをつかみ、透明なライナーを剥がして接着面を露出させる。
- 接着面を下にして、傷の中央に貼り付ける。
- 傷病者の評価を継続し、本品の動作を監視する。
- 必要な場合はタブを使用して空気を排出し、再度密閉する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 救急訓練を受けた緊急対応者のみが使用すること。
- 包装に破損、汚染等の異常がある場合は使用しないこと。
- 本品の上から脱気針を刺さないこと。
- 衣服のボタン等、突起物がある部位への貼付は避けること。
- 他のチェストシールと同様に、使用中は負傷者の状態及び緊張性気胸の兆候を継続監視すること。
- 緊張性気胸の症状が現れた場合は直ちに対処し、通気のために本品の端を短時間剥がす、又は脱気針による胸腔脱気を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期限

ガンマ線滅菌 製造後 5 年（外装に記載）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 14 番地 20
電話：04 -470-9041（代） FAX：045-470-9043

2. 製造業者

MedTrade Products Limited.（英国）