

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

再使用禁止

CVN アビエーターバンデージ

【警告】


- 救急救命の訓練を受けた上で使用すること
- 血液、体液で汚染された場合は廃棄すること
[交差感染の可能性がある]
- 内包装に破損がある場合は使用しないこと [滅菌状態が保持できず、感染のリスクがあるため]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理】

1. 外観図

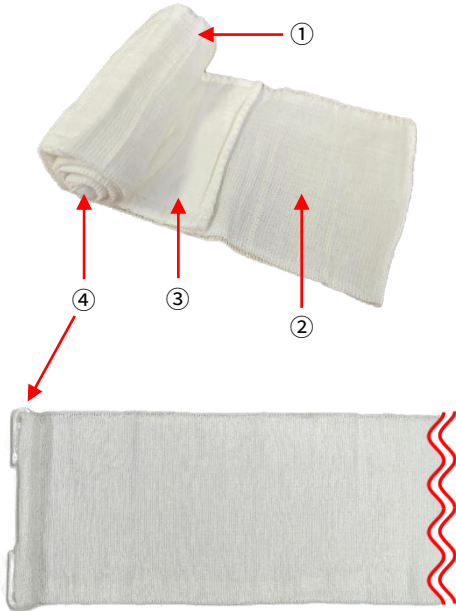

番号	名称	機能または動作
①	伸縮包帯	伸縮する素材で構成されており、創傷部位に圧迫を加えながら巻き付ける
②	ハンドルループ	本品を創傷部位に適用する際にこの部位を手で持って固定する
③	パッド	創傷部位の保護のためのパッドで、創傷部位に当てて使用する
④	クロージャーバー	本品を巻き終えた後に末端で固定するために使用する

2. 原材料

番号	名称	原材料
①	伸縮包帯	コットン、ポリアミド繊維、ポリウレタン
②	ハンドルループ	コットン、ポリアミド繊維、ポリウレタン
③	パッド	フラッフパルプ
④	クロージャーバー	ポリカーボネート

3. 寸法・仕様

種類	サイズ(cm)	パッド (cm)	本体重量(g)
4 インチ ホワイト	10x115	10x12	34

4. 原理

出血部分をパッドで覆い、圧力をかけて包帯を巻くことにより、損傷部位を保護し止血を促す。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

【使用方法】

- 外包装を開封し、内包装から本品を取り出す。
この時、内包装に破損がないか確認する。破損があった場合、感染のリスクがあるため使用しないこと。
- ハンドルループを手に持ち、創傷部位にパッドを当て、圧迫を加えながら伸縮包帯を巻いていく。
- 末端まで巻き終えたら、クロージャーバーの両端を伸縮包帯の端に引っ掛けるようにして固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
- 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期間

8年（ガンマ線滅菌 包装に記載）

【保守・点検に係る事項】

内包装に破損がある場合は使用しないこと。

（滅菌状態が保持できず、感染のリスクがあるため）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20

光正第2ビル 301

電話：045-470-9041（代）

F A X：045-470-9043

2. 製造業者

Anji Hengfeng(中華人民共和国)