


医療用品 05 副木
一般的名称 成形副木 35354000
ヘッドイモビライザー

【禁忌・禁止】

1. 血液、体液等で汚損の場合は再使用しないこと
2. 本品はスクースストレッチャーとの併用を前提とした器具のため、単体では使用しないこと
3. 本品を改造しないこと

【形状・構造及び原理】

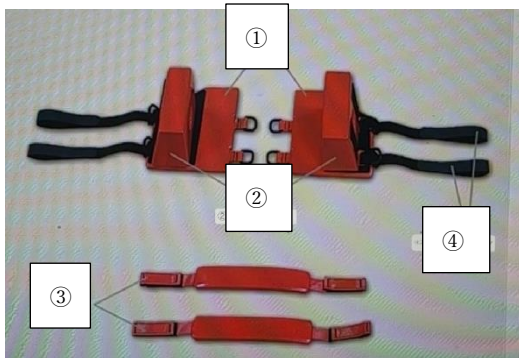

- ① 下板
- ② ヘッドサポート
- ③ 固定ストラップ
- ④ ストレッチャー接続ストラップ

*** 【寸法】**



高さ 16 cm x 幅 34 cm x 奥行 21 cm

【原材料】

EPDM 及びナイロン

【使用目的又は効果】

頭頸部外傷を負った傷病者に対し、負傷箇所を固定するために使用する。

【使用方法】

- (1) 患者の怪我を正確に把握する。
- (2) 製品の底板を担架に結合させる。
- (3) 製品の頭部サポートを患者の頭の両側に置き、下部プレートに接着する。
- (4) 患者の額と顎部分に固定紐をそれぞれ配置してから

患者の髪のサイズに合わせて長さを調整し、頭固定台下板に結合させる。

- (5) 患者の頭がしっかりと固定されていることを確認し移送する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用方法を習得した上で使用すること。
- (2) 装着中は傷病者の状態を観察し続けること。
- (3) その他の注意事項は警告、禁忌・禁止の項を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期間

本品に有効期間の表記はないが、保管方法の項に記載されている条件で適切に保管し、定期的に状態を確認すること。劣化が確認できた場合は、廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
- (2) 長期保管する場合は、器具に劣化がないか、機能に問題がないか定期的に確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20
光正第2ビル301
電 話：045-470-9041 (代)
F A X：045-470-9043

2. 製造業者

SHANGHAI EMSS MED&TECH CO., LTD(中華人民共和国)