


医療用品 05 副木
一般的名称 成形副木 35354000
ヘッドイモビライザー

【禁忌・禁止】

1. 血液、体液等で汚損の場合は再使用しないこと
2. 本品はスクープストレッチャーとの併用を前提とした器具のため、単体では使用しないこと
3. 本品を改造しないこと

【形状・構造及び原理】

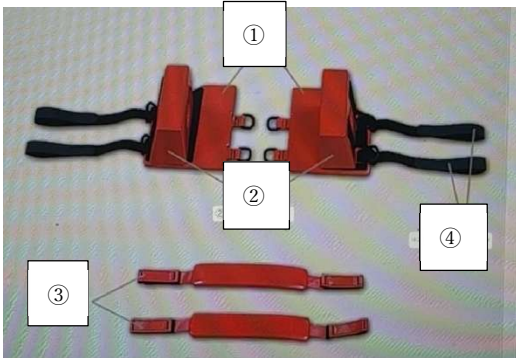

- ① ベースプレート
- ② ヘッドサポート
- ③ 固定ストラップ
- ④ ストレッチャー接続ストラップ

【寸法】



高さ 16cm×幅 34cm×奥行 210.21cm

【原材料】

EPDM 及びナイロン

【使用目的又は効果】

頭頸部外傷を負った傷病者に対し、負傷箇所を固定するために使用する。

【使用方法】

- (1) 患者の怪我を正確に把握する。
- (2) ストレッチャー接続ストラップを使って、ベースプレートを担架に結合させる。
- (3) ヘッドサポートを患者の頭の両側に置き、ベースプレートに接着する。

- (4) 患者の額と顎部分に固定ストラップをそれぞれ配置してから患者の髪のサイズに合わせて長さを調整し、ベースプレートに結合させる。
- (5) 患者の頭が固定されていることを確認し移送する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用方法を習得した上で使用すること。
- (2) 装着中は傷病者の状態を観察し続けること。
- (3) その他の注意事項は、禁忌・禁止の項を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期間

本品に有効期間の表記はないが、保管方法の項に記載されている条件で適切に保管し、定期的に状態を確認すること。劣化が確認できた場合は、廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
- (2) 長期保管する場合は、器具に劣化がないか、機能に問題がないか定期的に確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
神奈川県横浜市港北区 1-14-20

電話：045-470-9041（代） FAX：045-470-9043

2. 製造業者

SHANGHAI EMSS MED&TECH CO., LTD（中華人民共和国）又は

*ANPING GUARDIAN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.
（中華人民共和国）