

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
般的名称 短期的使用鼻咽頭エアウェイ 70260000

再使用禁止

CVN 経鼻エアウェイ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 製品の改造・分解禁止
- 次の患者には使用しないこと
頭蓋骨損傷、鼻骨折、上顎骨骨折、脳出血が疑われる患者

【形状・構造及び原理】



【原材料】

部位	材質
チューブ	ポリ塩化ビニル
コネクタ	プラスチック

【寸法】

種類	単位(mm)
外径(28Fr)	9.3
内径	7.0
全長	160.0

【原理】

鼻腔から挿入し、気道を確保する。

【使用目的又は効果】

ゴム又はプラスチック製のエアウェイで、気道の開存性を維持するために、鼻孔から咽頭に挿入する。

【使用方法】

- 鋭角にカットされている先端部に付属の潤滑剤を塗りゆっくりと挿入していく。
- コネクタ部を適宜固定する。

【使用上の注意】

包装に破損がある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期間

5年(エチレンオキサイドガス滅菌 包装に記載)

【保守・点検に係る事項】

包材に破損がある場合は、使用しない事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-14-20
電話：045-470-9041 (代) FAX：045-470-9043

2. 製造業者

Anji Hengfeng (中華人民共和国) 又は
*CVN Medical Solutions (フィンランド)