

医療用品 04 整形用品  
一般的名称 アイパッド 11661000

再使用禁止

## CVN アイシールド

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止・滅菌禁止
2. 製品の改造・分解禁止

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 1. 製造販売業者


株式会社オーストリッチインターナショナル

#### 2. 製造業者

Anji Hengfeng（中華人民共和国）又は

\*CVN Medical Solutions（フィンランド）

### 【形状・構造及び原理】

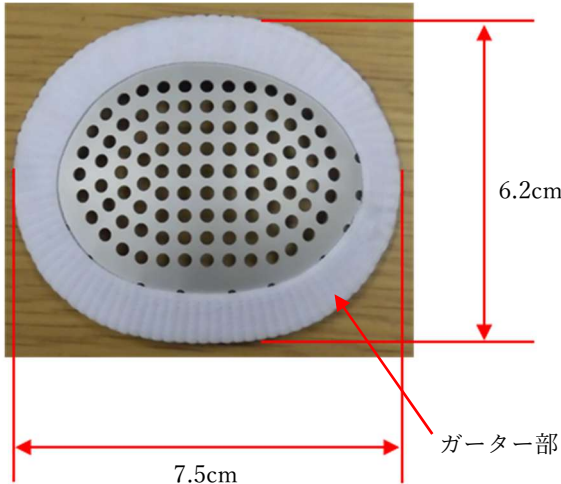

### 【原材料】

部位	材質
本体	アルミニウム
ガーター部	布

### 【原理】

眼の傷の早期治癒、感染を防止する。

### 【使用目的又は効果】

眼の保護又は分泌物の吸収に用いる。

### 【使用方法】

- (1) 使用前にキズ、汚れ、変形等の異常が無いことを確認する。
- (2) まぶたにあてがい、適宜固定する。

### 【使用上の注意】

本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

包材に破損がある場合は、使用しないこと。