

医療用品 05 副木
一般的名称 単回使用パッド入り副木 35357000

再使用禁止

CVN スプリント

【禁忌・禁止】

1. 製品を改造・分解をしないこと
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理】

1. 外観図



CVN スプリント (単品、展開時)



CVN スプリントセット (収納袋)



CVN スプリントセット (大、中、小)

2. 寸法

名称	伸長時サイズ(cm)	重量(g)
CVN スプリント	100 x 11 x 0.5	16
CVN スプリント セット	大: 10 x 11 x 0.5(1個) 中: 50 x 11 x 0.5(1個) 小: 9.5 x 4.5 x 0.25(2個)	287

3. 原材料

カバー：ポリエチレン
芯材：アルミニウム

4. 原理

損傷した身体部位を固定する。

【使用目的又は効果】

身体の損傷部位を固定するために用いるパッド入り器具。

【使用方法】

- (1) 本品を患部に合わせ適切に成形する。
- (2) ガーゼ等で患部を固定する。

【使用上の注意】

- (1) 金属アレルギーのある患者には使用しないこと。
- (2) 形状くせが残る為再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-14-20
電話：045-470-9041 (代) FAX:045-470-9043

2. 製造業者

Anji Hengfeng (中華人民共和国) 又は
*CVN Medical Solutions (フィンランド)