

医療用品 04 整形用品
一般的名称 医療ガーゼ 13700000

再使用禁止

CVN パッキングガーゼ

【警告】

1. 血液、体液で汚染された場合は廃棄すること
[交差感染の可能性ある]
2. 包装に破損がある場合は使用しないこと [滅菌状態が保持できず、感染のリスクがあるため]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理】

1. 外観図



2. 寸法

2.1. 外装

20 x 15 x 1 cm

2.2. 重量

37.2 g

2.3. 本体（伸長時）

11.43 x 375 cm

3. 原材料

6 プライコットン

4. 原理

本品は長方形に圧縮されたガーゼである。
出血の治療、傷の被覆等に使用される。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。

【使用方法】

- (1) 本品をパッケージから取り出す。
- (2) 使用目的、使用部位に合わせて形状を変える。
- (3) 傷口に対して使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 警告、禁忌・禁止の項に記載されている通り。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期間

ガンマ線滅菌(有効期限 10 年 外装に記載)

【保守・点検に係る事項】

長期保管する場合は、圧縮状態が維持されていることを確認し、空気が内部に入り込んでいないことを確認すること。
内部に空気が入り込んでいる場合は、滅菌状態が保持できず、感染の可能性があるため使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区一丁目 1 4 番地 2 0
光正第 2 ビル 301
電 話：045-470-9041（代）
F A X：045-470-9043

2. 製造業者

Anji Hengfeng(中華人民共和国)