

医療用品 04 整形用品

一般の名称 医療ガーゼ 13700000

ヘムガードバンテージ

再使用禁止

【警告】

1. 救命救急の専門家から訓練を受けたうえで使用すること。
2. 血液体液で汚染された場合は廃棄すること。

【禁忌・禁止】

再使用禁止。使用後は破棄し、再使用は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等



2. 原材料

名称	材質
伸縮包帯	ポリエステル、ポリウレタン、コットン
創傷被覆材（パッド）	コットンビスコース、ポリエステル

3. 寸法

種類	重量 (g)	包帯部 (mm)	パッド (mm)
プレッシャーバンテージ 4 インチ	40	100x1350	100x135
プレッシャーバンテージ 6 インチ	60	150x1350	150x135
フラットバンテージ 4 インチ	40	100x1350	100x135
フラットバンテージ 6 インチ	60	150x1350	150x135

4. 原理

出血部位を創傷被覆材（パッド）で覆い、プレッシャーバーに伸縮包帯を巻き付けることにより圧力をかけて、損傷部位を保護し止血を促す。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具。

【使用方法等】

1. 本品をパッケージから取り出す。
2. 傷口にパッドを乗せ、伸縮包帯を巻いていく。
3. 伸縮包帯をプレッシャーバーの爪に通し、引っ張りながら反対方向に巻く。
4. 別のプレッシャーバーの爪に伸縮包帯を通し、再度反対方向に巻く。プレッシャーバーで患部が抑えられるように巻く。
5. 創傷被覆材（パッド）が隠れるように、伸縮包帯をプレッシャーバーの上から巻く。
6. ベルクロテープ及びクロージャークリップで固定する。

【使用上の注意】

1. 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
2. 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法：水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて、常温で保管すること。
2. 有効期間：外装表示参照（ガンマ線滅菌、有効期限 5 年）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者
株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 1 4 番地 2 0
光正第 2 ビル 301
電 話：045-470-9041（代）
F A X：045-470-9043
2. 製造業者
CHINA SURGICAL DRESSINGS CENTER CO., LTD
（中華人民共和国）