

医療用品 04 整形用品  
一般的名称 医療ガーゼ 13700000

**再使用禁止****プレッシャーバー (医療ガーゼ付属品)****【警告】**

1. 血液体液で汚染された場合は廃棄すること [交差感染の可能性はある]
2. 損傷部位に直接触れないように使用すること [未滅菌のため感染の可能性はある]

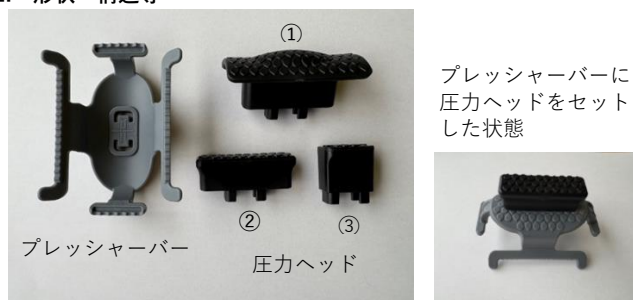
**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

株式会社オーストリッチインターナショナル  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 1 4 番地 2 0  
光正第 2 ビル 301  
電 話：045-470-9041 (代)  
F A X：045-470-9043

**2. 製造業者**

CHINA SURGICAL DRESSINGS CENTER CO., LTD  
(中華人民共和国)

**【形状・構造及び原理等】****1. 形状・構造等**

プレッシャーバーに圧力ヘッド①が付属したラージヘッドタイプと、圧力ヘッド①-③が付属したフルセットタイプがある。

**2. 原材料**

ポリカーボネート

**3. 原理**

出血部位を創傷被覆材 (パッド) 等で覆い、プレッシャーバーに包帯 (医療ガーゼ) 等を巻き付けることにより圧力をかけ、止血を促す。プレッシャーバーに圧迫ヘッドを付けることにより、圧迫力をより強めることができる。

**【使用目的又は効果】**

医療ガーゼに付属して使用することにより、出血部位への圧迫力を強め、出血の抑制目的に使用する。

**【使用方法等】**

1. 本品をパッケージから取り出す。
2. 出血部位に創傷被覆材 (パッド) を乗せ、包帯を巻いていく。
3. 必要の場合はプレッシャーバーに、適切な大きさの圧力ヘッドをセットする。
4. 創傷被覆材 (パッド) の中央にプレッシャーバーを置く。
5. 包帯をプレッシャーバーの爪に通し、引っ張りながら反対方向に巻く。
6. プレッシャーバーで出血部位が抑えられるように、プレッシャーバーの別の爪に包帯を通し再度反対方向に巻く。
7. 包帯を固定する。

**【使用上の注意】**

1. 本品は未滅菌品である。創傷部位に直接触れないよう、医療ガーゼの上に置いて使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法：水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて、常温で保管すること。
2. 有効期間：外装表示参照 (製造後 8 年)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

1. 製造販売業者