


医療用品 05 副木

一般的名称 成形副木 35354000

CVN ヘッドイモバイザー

【形状・構造及び原理】

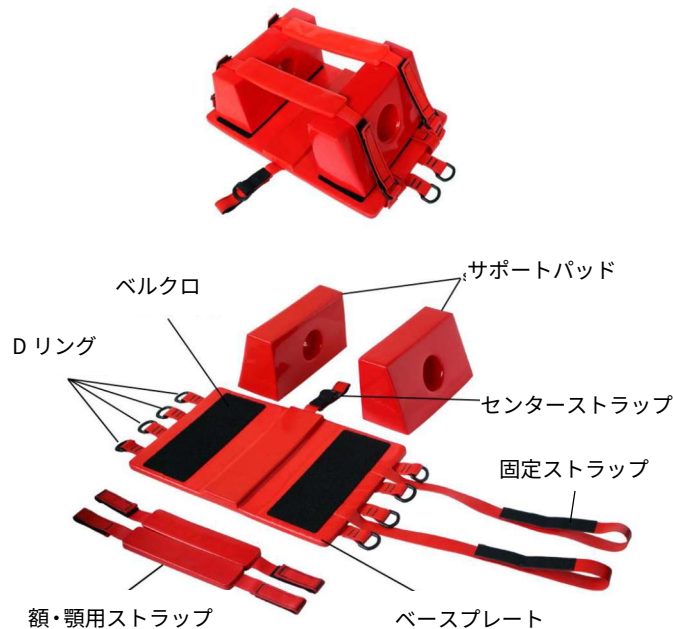

【使用目的又は効果】

頭頸部外傷を負った傷病者に対し、負傷箇所を固定するために使用する。

【使用方法】

- (1) 両方のサポートパッドを取り外し、全てのストラップを緩めてヘッドイモバイザーを分解する。ベースプレートをスクープストレッチャーの頭側にある中央ホールの下に配置する。ストレッチャーに中央ホールが無い場合は、それに応じてストレッチャーの位置を調節する。
- (2) 固定ストラップをストレッチャーの側面にあるスロットに通し、ベルクロに取り付けて固定する。スロットが無い場合は、固定ストラップをストレッチャーの下に通して固定する。
- (3) ストレッチャーの頭側に中央ホールがある場合は、センターストラップを穴に通し、バックルに通して締める。中央ホールが無い場合は、センターストラップをそのまま固定した状態にする。
- (4) 全てのストラップを締め、ベースプレートがストレッチャー上で固定されていることを確認する。サポートパッドを患者の頭周りに配置する。パッドの平らな面が耳にぴったり合うようにする。
- (5) サポートパッドを固定したら、額・顎用ストラップを患者の額の中央に置き、ストラップの両端をDリングに通してループ状にし、固定する。二本目の額・顎用ストラップの使用については専門家に相談すること。

【使用上の注意】

- (1) 使用方法を習得した上で使用すること。
- (2) 装着中は傷病者の状態を絶えず観察すること。
- (3) 傷病者の安全を確保するため、本品は2名以上の訓練を受けたものが使用すること。
- (4) 必要に応じて、中性洗剤とお湯で手洗いすること。
- (5) 本品はスクープストレッチャー等との併用を前提とした器具である。単品では使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期間

本品に有効期間の表記はないが、保管方法の項に記載されている条件で適切に保管し、定期的に状態を確認すること。劣化が確認できた場合は、廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

長期保管する場合は、器具に劣化がないか、機能に問題がないか定期的に確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル

2. 製造業者

CVN Medical Solutions（フィンランド）