

再使用禁止

カオリン止血ガーゼ X-Ray

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止・再滅菌禁止
2. 創傷閉鎖前に除去すること [本品は非吸収性である]
3. 眼内には使用しないこと [安全性が確認されていない]

【形状・構造及び原理】

1. 形状、構造等



2. 寸法

7.5 cm×3.7m

(折りたたみ時：7.5 cm×5.5 cm)

3. 原材料

ガーゼ：セルロース不織布、カオリン、グリセリン

X線造影系：ポリプロピレン、硫酸バリウム

4. 原理

本品は、X線検知可能な糸付きの合成繊維から成る滅菌済みZ折り不織布ガーゼである。本品を直接創傷部にあて、本品が血液等を吸収することにより止血に寄与する。

【使用目的又は効果】

局所出血部位、外傷等の出血の抑制、液の吸収のために用いる。

【使用方法】

1. 創傷部位を露出し、可能であれば余分な血液を除去する。
2. 出血源を特定する。
3. 本品を出血源に直接接触させ、創傷内に充填する。
4. 創傷腔が完全に満たされるまで充填を行う。
5. 3分間、又は出血が抑えられるまで傷口を圧迫する。
6. 止血されていることを確認する。出血が継続する場合は本品を追加して使用する。
7. 圧迫包帯又は適切な固定材で本品を固定する。

8. 24時間以内に本品を創傷部位から取り除く。取り除きにくい場合は、生理食塩水で濡らすとスムーズに除去することができる。
9. 創傷部位を生理食塩水で優しく洗浄し、残存している可能性のあるカオリンを除去する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 包装に破損がある場合は使用しないこと。
2. 本品は出血源に直接接触させて使用すること。
3. 出血が続く場合は本品を追加して使用すること。
4. 本品の使用は24時間を超えないこと。
5. ヘパリンナトリウム、塩酸クロピドグレル、ワルファリンカリウム以外の抗凝固薬／抗血小板薬を使用中の患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管する。

2. 有効期限

外装表示参照 (ガンマ線滅菌、有効期限5年)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目14番地20
電話：045-470-9041 (代) FAX：045-470-9043

2. 製造業者

Anji Hengfeng (中華人民共和国)
CVN Medical Solutions (フィンランド)