

## 医療用品 04 整形用品

一般的名称 医療用不織布 34655000

## 再使用禁止

## オラエス モジュラーバンデージ

## 【禁忌・禁止】

- ・再使用・再滅菌禁止

## 【形状、構造及び原理】

## 1. 形状及び外観写真



## 2. 原材料

名称	原材料
包帯、ガーゼパッド、パッド	綿、ポリアミド、ポリエステル、ポリエチレン、レーヨン
プラスチックカップ	ABS樹脂
クロージャーバー	ABS樹脂

## 3. 原理

本品は医療用の不織布である。出血部位をパッド又はガーゼパッドで覆い、プラスチックカップにより圧をかけて包帯を巻くことにより、創傷部位を保護し、止血を促す。

## 【使用目的又は効果】

創傷の被覆及び保護、出血の抑制、創傷部位の固定等に用いる。

## 【使用方法】

- (1) プラスチックカップが傷口の上に来るようにパッドを損傷部位に直接置く。ガーゼパッドを使用する場合は傷口をガーゼパッドで覆う。
- (2) 包帯をしっかりと巻く。
- (3) 包帯をクロージャーバーで固定する。

## 【使用上の注意】

1. 包装に破損がある場合は使用しないこと。
2. 開封後は速やかに使用すること。
3. 本品を使用中、創傷部に感染が発生した場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
4. 本品の使用中に濡れや汚染があった場合には、直ちに新しいものと交換すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

## 1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

## 2. 有効期間

外装表示参照（ガンマ線滅菌、製造後5年）

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

## 1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル  
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目14番地20  
電話：045-470-9041 FAX：045-470-9043

## 2. 製造業者

TACMED SOLUTIONS, LLC（アメリカ合衆国）