

医療用品 04 整形用品

一般的名称 医療用不織布 34655000

再使用禁止

オラエス モジュラーバンデージ

【禁忌・禁止】

- ・再使用・再滅菌禁止

【形状、構造及び原理】

1. 形状及び外観写真



2. 寸法

名称	4 インチ	6 インチ
創傷パッド	10.2 cm×10.2 cm	15.2 cm×15.2 cm
ガーゼ	3m×10 cm	3m×15 cm
密閉シート	12.7 cm×12.7 cm	40 cm×40 cm
包帯	122 cm×10.2 cm	122 cm×15.2 cm

3. 原材料

名称	原材料
創傷パッド	ポリエチレン、綿、レーヨン
ガーゼ	綿
密閉シート	ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン

4. 原理

本品は医療用の不織布である。出血部位を創傷パッド又はガーゼで覆い、プラスチックカップにより圧をかけて包帯を巻くことにより、創傷部位を保護し、止血を促す。

【使用目的又は効果】

創傷の被覆及び保護、出血の抑制、創傷部位の固定等に用いる。

【使用方法】

症例の形態及び受傷部位に応じ、以下の操作方法を選択して使用する。

1. 標準的な圧迫止血

- (1) 本品を開封し、創傷パッドを直接、傷口の真上に当てる。
- (2) 包帯を適度に緊張させながら、創傷パッドの上を覆うように 1 周巻き付ける。
- (3) 創傷パッド上部にある圧力カップの内側に包帯を通し、反転させて強く引っ張ることで創部を圧迫する。
- (4) 残りの包帯を患部に巻き進め、末端のクロージャージャーバーを包帯表面に引っ掛けて固定する。

2. 深部創傷への対応

- (1) 創傷パッドの格納部からガーゼを取り出す。
- (2) 深部創傷（出血点）へ、ガーゼを隙間なく直接押し込んで充填する。
- (3) 充填後、その上から創傷パッドをかぶせ、上記「1. 標準的な圧迫止血」の手順に従って包帯及び圧力カップを用いて固定・圧迫する。

3. 開放性気胸等の処置（チェストシールの代用）

- (1) 創傷パッドから密閉シートを取り外す。
- (2) 胸部の創傷（空気の出入りがある部位）に密閉シートを直接密着させ、空気の流通を遮断する。
- (3) 密閉シートの上から創傷パッドを当て、胸部を過度に圧迫しない適度な張力で包帯を巻いて固定する。

4. 眼外傷への対応（アイシールド）

- (1) 創傷パッドから圧力カップを取り外す。
- (2) 取り外した圧力カップを反転させ、眼球に直接接触しないよう目の周りの骨（眼窩）に位置を合わせて被せる。
- (3) 圧力カップが動かないよう、頭部に包帯を巻き付けて固定する。

【使用上の注意】

1. 包装に破損がある場合は使用しないこと。
2. 開封後は速やかに使用すること。
3. 本品を使用中、創傷部に感染が発生した場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
4. 本品の使用中に濡れや汚染があった場合には、直ちに新しいものと交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照（ガンマ線滅菌、製造後 6 年）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 14 番地 20
電話：045-470-9041 FAX：045-470-9043

2. 製造業者

TACMED SOLUTIONS, LLC（アメリカ合衆国）又は
HUBEI QIANJIANG KINGPHAR MEDICAL MATERIAL
CO.,LTD（中華人民共和国）