

医 04 整形用品
一般的名称 医療用不織布 34655000
セロックスラピッド

再使用禁止

【警告】

1. 救急救命の訓練を受けた上で使用すること
2. 手術用には使用不可
3. 目の処置には使用不可（炎症の恐れがあるため）
4. 血液体液で汚染された場合は廃棄すること


【禁忌・禁止】

1. 包装に異常がある場合は使用しないこと
2. 再使用不可（血液感染の可能性があるため）

* 【形状・構造及び原理】

本品は、合成繊維から成る不織布ガーゼである。

1. 外観

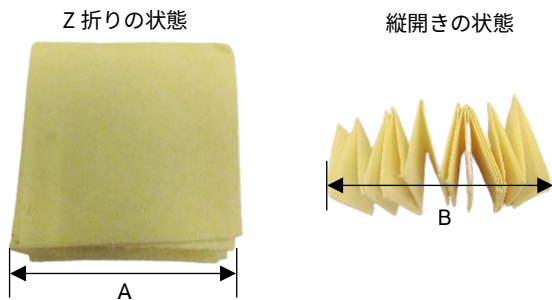


2. 寸法

型式	A(cm)	B(cm)	重量(g)
通常(Z 折り)タイプ	7.6	152.4	27
リボンタイプ	2.54	152.4	9

※B は折り畳んだ状態のものを完全に展開した状態の長さ

3. 構造

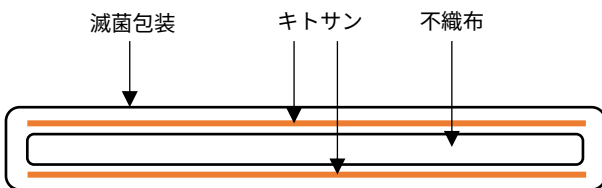

4. 原材料

ビスコース、ポリオレフィン、キトサン

5. 原理

出血面（部位）を覆うと、プラス電荷のキトサンにマイナス電荷の赤血球及び血小板が引き寄せられて凝固し出血が抑制される。また、赤血球と血小板が不織布ガーゼに凝固するため、再出血を防ぐ。

【使用目的又は効果】

本品は、局所出血部位、外傷等の出血の抑制、液の吸収のために用いる。

【使用方法】

- (1) パッケージを開封して取り出し Z 折となっているガーゼの一方を持つ。
- (2) 広げた本器の端で出血箇所を覆ったあと創傷部全体を埋めるようにする。
- (3) 少なくとも 1 分間または出血が止まるまで創傷に対しての直接圧迫を行う。
- (4) 創傷部位の圧迫止血を維持できるように適切な包帯等を巻き付ける。
- (5) 使い残しは適切に廃棄する。
- (6) 患者を速やかに移送する。
- (7) 使用した空のパッケージを次の医療機関に渡す。

【使用上の注意】

- 適応対象は中度から重症の出血コントロールとする。
- 一時的な外用として使用すること。
- 目の処置に使用しないこと、万が一目に炎症が起こった場合は十分な水で 5 分以上洗浄する。
- 本格的な処置の前に必ず滅菌生理食塩水で残留した顆粒を取り除き、創部を十分に洗浄すること。
- 製造工程において、甲殻類アレルギーの原因となるたんぱく質（トロポミオシン）が除去されたキトサンが使用されている。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れ、高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管
2. 有効期限
ガンマ線滅菌 有効期限 5 年（パッケージに記載）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者
株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区一丁目 14 番地 20
光正第 2 ビル 301
電 話：045-470-9041（代）
F A X：045-470-9043
2. 製造業者
MedTrade Products Limited.（イギリス）