

医療用品 04 整形用品
一般的名称 救急絆創膏 34864000
フォックスチェストシール

再使用禁止

- 【警告】

 - 救急救命の訓練を受けた上で使用すること
 - 血液、体液で汚染された場合は廃棄すること
- 【禁忌・禁止】

 - 包装に異常がある場合は使用しないこと
 - 再使用禁止（血液感染の可能性があるため）

*【形状・構造及び原理】

本品は、主に胸部の傷の被覆及び保護・傷口の皮膚接合・身体の創傷部位の支持等に用いる。穿通創が考えられる場合でも、一方弁により空気の排出ができ、外気の流入を防ぐことを可能にしている。

1. 外観

1) 弁付き



2) 弁無し



2. 寸法

型式	パッケージサイズ(cm)	本体サイズ(cm)
弁付き	16 x 16	13 x 13.3
弁無し	16 x 16	13 x 13.3

3. 原材料

部位	材質
一方弁	ポリエチレン樹脂
台座、弁無し	ポリエチレン樹脂

4. 枚数

型式	1 包装あたりの入数(枚)
弁付き	1
弁無し	2

【使用目的又は効果】

身体の部位に用いる、接着剤を付した、布製、プラスチック製等の絆創膏を言う。パッドを付する場合もある。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

*【使用方法】

- 創傷部位周囲の汚れをガーゼ等で拭き取る。
- パッケージを開封し、本品を取り出す。
- タブを掴んで透明な剥離シートを剥がし、粘着面を露出させる。
- 創傷周囲の皮膚に本品をしっかり押し付けて密閉する。
（穿通創がある場合は、傷口の反対側の傷に本品の弁なしを同様に貼る）
- 負傷者の評価を継続し、本品の動作を確認する。
- 必要な場合はタブを使用して通気し、再度密閉する。

【使用上の注意】

- 負傷者に緊張性気胸の症状が現れた場合、本品を通して脱気針を挿入しないこと。
- 本品の通気が妨げられるような状態にはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期限

ガンマ線滅菌 製造後 5 年（パッケージに記載）

【保守・点検に係る事項】

- 機能を損なう可能性があるため、本品を突起物の上に置かないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目 1 4 番地 2 0

光正第 2 ビル 301

電 話：045-470-9041（代）

F A X：045-470-9043

2. 製造業者

MedTrade Products Limited.（英国）