

医 04 整形用品

一般的名称 医療用不織布 34655000

セロックス EMS 止血ガーゼ

再使用禁止

【警告】

1. 救急救命の専門家から救急救命の訓練を受ける事
2. 血液体液で汚染された場合は廃棄すること。

【禁忌・禁止】


製品を改造・分解しないこと
再使用禁止

【形状・構造及び原理】

止血ガーゼ 4×4 インチ

収納時

(10.2×10.2cm)

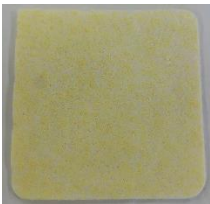

展開時


(10.2×20.3cm)



止血ガーゼ 8×8 インチ


収納時

(10.2×10.2cm)

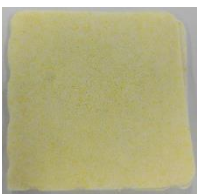

展開時

(20.3×20.3cm)

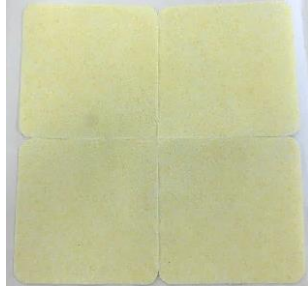

【原材料】

不織布	ビスコース、ポリカプロラクトン
キトサン	キトサン

【原理】

本品で出血部位を覆うと、プラス電荷のキトサンにマイナス電荷の赤血球及び血小板が引き寄せられて凝固し出血が抑制される。また赤血球と血小板が不織布ガーゼに凝固するため、再出血を減少させる。

【使用目的又は効果】

創傷を処置するために用いる不織布からなる被覆・保護材。

【使用方法】

1. パッケージを開封し、本品を取り出す。
2. 広げた本器の端で出血箇所を覆ったあと創傷部全体を埋めるようにする。埋まらない場合は、本品を追加するか滅菌ガーゼを使用すること。
本品に余分がでたらカットすること。
3. 少なくとも3分間または出血が止まるまで創傷に対しての直接圧迫をしっかりと行う。
4. 創傷部位の圧迫止血を維持できるように適切な包帯等を巻き付ける。

【使用上の注意】

1. 血液、体液等で汚損の場合は、廃棄すること。
2. 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
3. 開封後直ちに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

有効期限：製造後5年（パッケージに記載）

【保守・点検に係る事項】

包材に破損がある場合は、使用しない事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20

光正第2ビル301

株式会社オーストリッチインターナショナル

電 話：045-470-9041（代）

FAX：045-470-9043

製造業者

製造会社名：MedTrade Products Limited.

製造先国名：イギリス