

医療用品04 整形用品  
一般的名称 医療ガーゼ 13700000  
FareTec レスポンダーバンデージ

再使用禁止


【警告】

- 救急救命の専門家から救急救命の訓練を受ける事
- 血液体液で汚染された場合は廃棄すること。

【禁忌・禁止】

- 製品を改造・分解しないこと  
再使用禁止

【形状・構造及び原理】

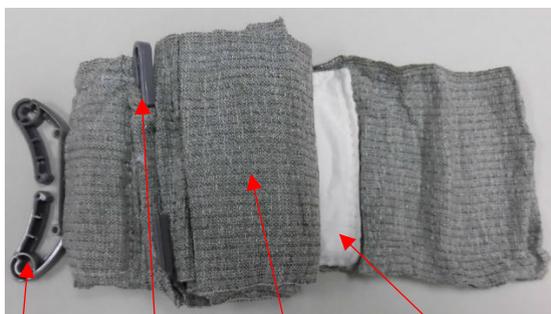

圧力バー 伸縮包帯 非粘着パッド  
コンプレッションバー

ガンマ線滅菌(有効期限5年 包装に記載)

【原材料】

伸縮包帯	コットン、ポリエステル
非粘着パッド	フラッフパルプ
圧力バー	ポリエチレン
クロージャーバー	ポリエチレン

【寸法】

種類	包帯(cm)	パッド(cm)
4インチレスポナーバンデージ	10×150 (450)	10×18
6インチレスポナーバンデージ	15×150 (450)	15×18
8インチレスポナーアブドミナルバンデージ	20×254 (457)	30×30

包帯全長：最大伸長時：( )内最大伸長時

【原理】

出血部分をパッドで覆い、圧力をかけて包帯を巻くことにより、損傷部位を保護し、止血を促す。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護及び皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具

【使用方法】

- 傷口にパッドを乗せ、伸縮包帯を巻いていく。
- 伸縮包帯を圧力バーの中に完全に通し、反対方向に巻き戻す。
- 伸縮包帯を圧力バーの上から巻き、パッドの端が、隠れるようにしっかりと巻く。
- 最後にクロージャーバーで、しっかりと固定する。

【使用上の注意】

- 血液、体液等で汚損の場合は、廃棄すること。
- 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。有効期限：製造後8年

【保守・点検に係る事項】

包材に破損がある場合は、使用しない事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20  
光正第2ビル301

株式会社オーストリッチインターナショナル  
電話：045-470-9041（代）  
FAX：045-470-9043

製造業者

FareTec Inc(アメリカ合衆国)