

医療用品 〇 4 整形用品
一般的名称 医療ガーゼ 13700000
CVN コンプレストガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

製品を改造・分解しないこと
再使用禁止

【形状・構造及び原理】



ガンマ線滅菌(有効期限 5 年 包装に記載)

【原材料】

伸縮包帯	6 プライコットン
------	-----------

【寸法】

11.43cm×3.75m

【原理】

出血部分を、圧力をかけて包帯を巻くことにより、損傷部位を保護し、止血を促す。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具

【使用方法】

- CVN コンプレストガーゼは、出血止めるためのツールです。
- 傷口を清潔にし、やや圧力をかけて傷をふさぎます。

【使用上の注意】

- 血液、体液等で汚損の場合は、廃棄すること。
- 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。有効期限：製造後 5 年

【保守・点検に係る事項】

包材に破損がある場合は、使用しない事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目 14 番地 20

光正第 2 ビル 301

株式会社オーストリッチインターナショナル

電話：045-470-9041 (代)

FAX：045-470-9043

製造業者

Anji Hengfeng (中華人民共和国)