

**2023 年 9 月 15 日(第 2 版)

製造販売届出番号 14B3X10037000019

*2023 年 7 月 10 日(第 1 版)

医 05 副木

一般的名称 単回使用パッド入り副木 35357000

CVN スプリント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

製品を改造・分解をしないこと
再使用禁止

**【形状・構造及び原理】

1. 外観図



CVN スプリント (単品、展開時)



CVN スプリントセット (収納袋)



CVN スプリントセット (大、中、小)

2. 寸法

名称	伸長時サイズ(cm)	重量(g)
CVN スプリント	100 x 11 x 0.5	160
CVN スプリント セット	大 : 100 x 11 x 0.5 中 : 50 x 11 x 0.5 小 : 9.5 x 4.5 x 0.5	287

3. 原材料

カバー : ポリエチレン
芯材 : アルミニウム

4. 原理

損傷した身体部位を固定する。

【使用目的又は効果】

身体の損傷部位を固定するために用いるパッド入り器具。

【使用方法】

- (1) 本品を患部に合わせ適切に成形する。
- (2) ガーゼ等で患部を固定する。

【使用上の注意】

- (1) 金属アレルギーのある患者には使用しないこと。
- (2) 形状ぐせが残る為再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、
直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

破損がある場合は、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒 222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目 14 番地 20

光正第 2 ビル 301

株式会社オーストリッチインターナショナル

電 話 : 045-470-9041 (代)

F A X : 045-470-9043

製造業者

Anji Hengfeng(中華人民共和国)