

**2023 年 10 月 16 日(第 2 版)

製造販売届出番号 14B3X10037000020

*2023 年 9 月 19 日(第 1 版)

医療用品 04 整形用品

一般的名称 医療ガーゼ 13700000

ハートマントラウマバンデージ

再使用禁止

【警告】

1. 救急救命の専門家から訓練を受けた上で使用すること
2. 血液体液で汚染された場合は廃棄すること

【禁忌・禁止】

1. 製品を改造・分解しないこと
2. 再使用禁止


**【形状・構造及び原理】

1. 外観図

1) パッケージ



2) バンデージ

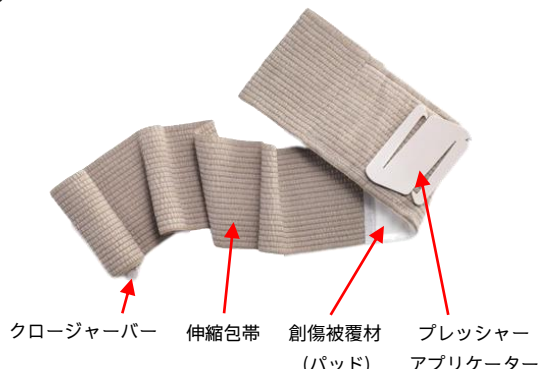

10cm 幅と 15cm 幅の 2 種類がある。

X 線滅菌済み。

(ISO 11137-1/-2 に従って無菌 SAL 10-6)

2. 原材料

部位名	材質
伸縮包帯	コットン、ポリアミド繊維 ポリウレタン
創傷被覆材 (パッド)	フラッフパルプ ポリプロピレン
プレッシャーアプリーケーター	ポリカーボネート
クロージャーバー	ポリカーボネート

3. 寸法

種類	重量 (g)	包帯部 (cm)	パッド (cm)	アプリーケーター (mm)	クロージャーバー (mm)
10cm 幅	78	10x160	10x20	90x63x4	90x9x12
15cm 幅	101	15x160	15x20	90x63x4	115x9x12

包帯部の寸法は展開時のもので、幅 x 長さ。

10cm、15cm 共に最大伸長は 450cm。

4. 原理

出血部分をパッドで覆い、圧力をかけて包帯を巻くことにより、損傷部位を保護し止血を促す。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具。

**【使用方法】

- (1) 傷口にパッドを乗せ、伸縮包帯を巻いていく。
- (2) 伸縮包帯をプレッシャーアプリーケーターの爪に通し、引っ張りながら反対方向に巻く。
- (3) もう片方のプレッシャーアプリーケーターの爪に伸縮包帯を通し、再度反対方向に巻く。アプリーケーターで患部が押さえられるように巻く。
- (4) 伸縮包帯をプレッシャーアプリーケーターの上から巻いていく。
- (5) 最後にクロージャーバーでしっかりと固定する。

【使用上の注意】

- (1) 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
- (2) 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。有効期限：製造後 5 年（未開封）

【保守・点検に係る事項】

包材に破損がある場合は、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目 14 番地 20 光正第 2 ビル 301

株式会社オーストリッチインターナショナル

電話：045-470-9041 (代)

FAX：045-470-9043

製造業者

IVF HARTMANN AG (スイス)