

2022 年 10 月 10 日 作成

届出番号 25B3X10007000004

歯科材料 07 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN 16189000

コスモスキャスティングワックス

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

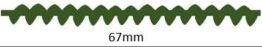
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・可燃性であるので、使用の際に火傷をしないように注意する。
- ・【使用目的又は効果】以外の目的に使用しない。

【形状、構造及び原理等】

タイプ	断面形状	長さ	内容量
補強線	半円 高さ 2.0mm		210mm
	半円 高さ 2.2mm		
	半円 高さ 2.5mm		
	半円 高さ 2.8mm		
リンガル	幅4.0mm×高さ1.5mm		300 g/箱
	幅4.5mm×高さ1.8mm		
	幅5.0mm×高さ1.7mm		
パラタル	幅5.0mm×高さ1.2mm		
	幅6.5mm×高さ1.3mm		

タイプ	形状	内容量
ムカデ	ムカデ様形状 	200本/箱

主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、カルナバワックス、ダンマルワックス、蜜ろう、着色剤

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャスティングワックスです。

【使用方法等】

歯科技工の通法に従い、床、バー、クラスプ等の鋳造ろう型を作製する際に、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び接着して使用する。
また、温水に浸漬して使用いただければ、より複雑な原型も容易にできる。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト

〒 520-1603

滋賀県高島市今津町北仰 452

TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070

〔製造業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト

〒 520-1603

滋賀県高島市今津町北仰 452

TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070