

再使用禁止

パソカッター

【禁忌・禁止】
・本製品はディスポーザブル品のため、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】*

1. 外観図

パソカッターⅠ 35°, パソカッターⅡ 35°
パソカッターR 22°, パソカッターR 35°



パソカッターHP, パソカッターHP-R



1/1

2. 材質

ブレード：ステンレス鋼

3. 形状及び種類

品 名	寸法 (厚×巾×長)
パソカッターⅠ 35°	0.25mm×8mm×80mm
パソカッターⅡ 35°	
パソカッターR 22°	
パソカッターR 35°	
パソカッターHP	0.31mm×14mm×75mm
パソカッターHP-R	

【使用目的又は効果】

非常に鋭利な切刃をもつ平たい楔形の刃として設計された器具である。通常、パラフィンで固定した組織を超薄片に削るために使用するマイクロトームに取り付けて使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

対応するブレードホルダーに装着し、更にマイクロトームに取り付けて使用します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本製品をディスペンサーケースから取り出す際には、刃先に注意しながら取り出すこと。
- 本製品を取り扱う際、刃先に触れてけがをしないように、取り扱いには注意すること。
[切れ味の低下、血液性疾患の病原体等の感染に繋がることがあります。]
- 使用後の廃棄は、医療廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにすること。

【保管方法及び有効期間等】*

1. 保管方法

- 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、室温で保管すること。
- 清潔で乾燥した場所に荷重のかからない状態で保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者名称：カイ インダストリーズ株式会社
住 所：〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
電 話 番 号：0575-28-6600

販 売 業 者 名 称：エルマ販売株式会社
住 所：〒342-0045 埼玉県吉川市木売3丁目4番地8
電 話 番 号：048-984-6211