

<一般医療機器 医療ガーゼ 13700000>

医 04 整形用品

尺角ガーゼ A J

再使用禁止

【警告】

○術後に枚数を確認することや術式に応じて使用する
脱脂綿の種類・準備枚数（最少単位）を決めておく
など体内に遺残させないよう対策をとること

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 電気メス等を近づけないこと
（引火するおそれがある）

【形状・構造及び原理等】

綿 100% ガーゼ
包装：パッケージに内容物のサイズ、入り数を記載

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの
器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は
内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼ
から成る器具をいう

【使用方法等】

使用目的に応じて適宜使用して下さい。
目的に応じて滅菌して下さい。
滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌を
使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光、水漏れ、火気及び高温・多湿を避け、
清潔な場所に保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
カクイ株式会社
〒890-0081 鹿児島市唐湊 4 丁目 1 6 番 1
お問い合わせ先 099-254-2131

製造元
株式会社ツムラ
〒594-1112 大阪府和泉市三林町 155-2