


【禁忌・禁止】

1. 本製品は使用目的以外に使用しないこと。
(誤った使用方法是破損を招く恐れがあります)
2. 使用期間中 本品を、曲げ・切削・打刻(刻印)等の
二次的加工(改造や分解)を加えることは
一切行わないで下さい。故障、折損等の原因となります。

【形状・構造等】


腔鏡(クスコー氏)

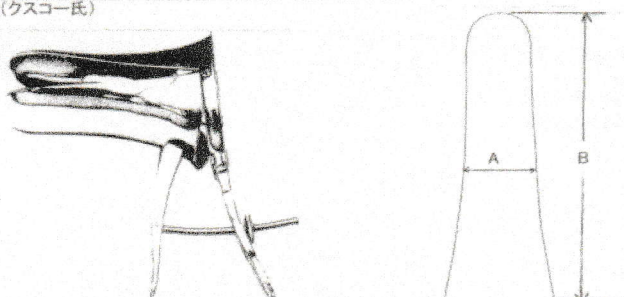

寸法(単位:mm)

サイズ タイプ	廠大型 (産徳用)	廠大型 (分産型)	廠大型 (井長)	SSS	SS	S	M	L	LL
A	42	42	45	13	18	23	26	30	37
B	110	110	130	78	80	97	105	110	118


腔鏡(桜井氏)

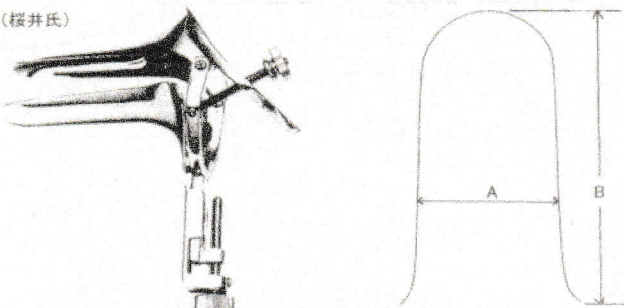

寸法(単位:mm)

サイズ	SS	S	M	L	LL	LLL
A	25	30	33	36	40	53
B	70	82	85	90	100	100

腔鏡(藤村氏)

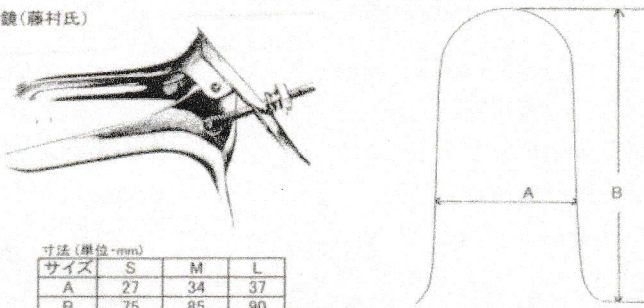

寸法(単位:mm)

サイズ	S	M	L
A	27	34	37
B	75	85	90

黄銅製:黄銅鑄物/板材/棒材(JIS H 5101/H 3100/H 3250)

- ☐ クロムメッキ仕上げ(JIS H 8617)
- ☐ ブラックメッキ仕上げ(アメリカ規格 MIL-C-14538A)
- ☐ ステンレス製:
ステンレス鑄物/板材(JIS SCS 13/ SUS 304)
黄銅挽物クロムメッキ仕上げ(JIS H 8617)

【使用目的・性能】

腔の診療・治療などの医療行為時に用いる手術器具である。
身体に挿入して開孔するときに伸張することができる。
検査又は他の器具の挿入時に用いる。

【操作方法・使用方法】

本製品は、ハンドル部を操作することにより、弁先端部が開き
目的部位を開孔することができる。
また、調整ダイヤルにより開孔状態を保持する。

【使用上の注意】

- (1) 本製品の取り扱いについては教育を受けた医療従事者が
適切に行って下さい。
- (2) 本製品は未滅菌のため使用前に必ず洗浄・滅菌を施すこと。
- (3) 使用時に必要以上の力(応力)を加えると、変形・破損等の
原因になるので注意すること。
- (4) 使用後は付着している血液、体液、組織片及び薬品等が
乾燥しないよう、直ちに洗浄すること。
その際取外し可能なものは取り外し、そうでないものは
稼動部をよく動かしながら洗浄すること。
- (5) 塩素系・要素系の消毒剤は、腐食の原因になるので
できるだけ使用を避けてください。
使用中に付着した時には、洗浄すること。
- (6) 強アルカリ・酸性洗剤は、腐食の原因になるので
使用しないこと。
- (7) 洗浄後は直ちに乾燥すること。

【滅菌方法】

- (1) 使用前に必ず洗浄・乾燥後、オートクレープで滅菌してください。
[設定条件は 121℃ 1.2kgf/cm² 20分間]
- (2) 再使用の場合も滅菌が必要である。

【保守・点検に係わる事項】

- (1) 本製品は日常点検し、可動部等が正常に動くことを確認すること。
特に変形・破損・ネジのゆるみ・脱落等の点検を行うこと。
- (2) 本製品は金属製であるため、度重なる使用により磨耗・金属疲労等
を起こす可能性があります。
異常が発見された場合は、使用を中止すること。

【包装】 1個(袋包装)

【製造販売業者及び製造業者】

合資会社 勝田金属製作所
〒131-0044
東京都墨田区文花1-6-10
Tel 03-3612-3451