

* 2014年1月12日改訂(第2版)
2005年8月1日作成(新様式第1版)


機械器具 15 舌圧子 / 舌圧子
一般医療機器 (JMDNコード: 14066000)

舌圧子電灯


【禁忌・禁止】

1. 使用中また使用途中、他の金属などと接触の無い様留意して下さい。
[接点・通電部は漏電、発熱を起こす恐れがあります]
2. 使用期間中本品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造や分解)を加えることは一切行わないで下さい。故障、折損等の原因となります。

【形状・構造等】

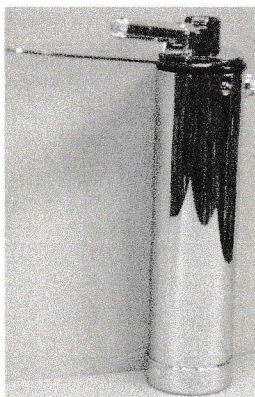

舌圧子電灯(小池式)

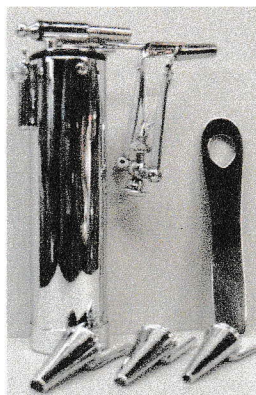

舌圧子耳鼻電灯

舌圧子: ステンレス板(JIS SUS 304)

電 灯: 黄銅製クロムメッキ仕上げ

ステンレス板 プラスチック・銅線・電球

耳鏡・鼻鏡: 黄銅製(JIS H 3250/ H3100)

クロムメッキ仕上げ(JIS H 8617)

【品目仕様等】

電球定格(3.1V 0.2mA)の明るさで照明することができる。

【使用目的・性能】

診療・治療などの医療行為時に

口腔内の暗所照明用及び、舌を圧定するために使用する。

*【操作方法・使用方法】

- (1) 電灯部に市販の乾電池(単二形)2本を
プラス側を上方向に装填し、底ふたを閉めます。
- (2) 消毒済みの舌圧子、耳鏡、耳鼻を、電灯上部の装着部に
確実に差込み固定させ、スイッチを操作し点灯する。

*【滅菌方法】

- (1) 舌圧子、耳鏡、耳鼻は使用前に必ず洗浄し
乾燥後オートクレープで滅菌してください。

[設定条件 121℃ 1.2kgf/cm² 20分間]

- (2) 再使用の場合も滅菌が必要である。

*【使用上の注意】

- (1) 使用目的以外での使用はしないで下さい。
- (2) 使用時は電球部と舌圧子を平行に保ち、ご使用ください。
- (3) 使用時に力を加える事、衝撃を加えることは
変形、破損、部品の脱落と点灯不良などの原因となります。
力的な負荷、衝撃を加えないで下さい。
- (4) 本体滅菌の必要場合は、アルコール清拭消毒をして下さい。
(オートクレープ滅菌は行わないで下さい)

*【貯蔵方法】

- (1) 本体は電気製品です、温度及び湿度の高い場所での
保管を避けてください。
- (2) 使用後はスイッチを切確実に切り、保管してください。
- (3) 長時間使用しない時は、乾電池を抜いて保管して下さい。
(電池の液漏れにより腐食が発生する場合があります)
- (4) 舌圧子、耳鏡、耳鼻の貯蔵・保管は
洗浄した後、必ず乾燥して下さい。

*【保守・点検に係わる事項】

- (1) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は使用しないで下さい。
器具を腐食させる恐れがあります。
- (2) 使用前に汚れ・キズ・曲がり・各部の損傷
可動部に異常がないことを確認してください。
(破損・水損・変色・べたつき、ガタつきを発見した場合は
使用しないで下さい)
- (3) 乾電池を装填・交換する際は、新旧及び異種電池の
混用使用はしないで下さい。

【包装】 1個

【製造販売業者及び製造業者】

合資会社 勝田金属製作所

〒131-0044

東京都墨田区文花1-6-10

TEL 03-3612-3451

類別(類別名称)/一般的名称

機械器具 15 舌圧子/舌圧子

一般医療機器 (JMDNコード: 14066000)


販売名

板状舌圧子・舌圧子電灯の付属補給用

【禁忌・禁止】

使用期間中本品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造や分解)を加えることは一切行わないで下さい。故障、折損等の原因となります。

【形状・構造等】

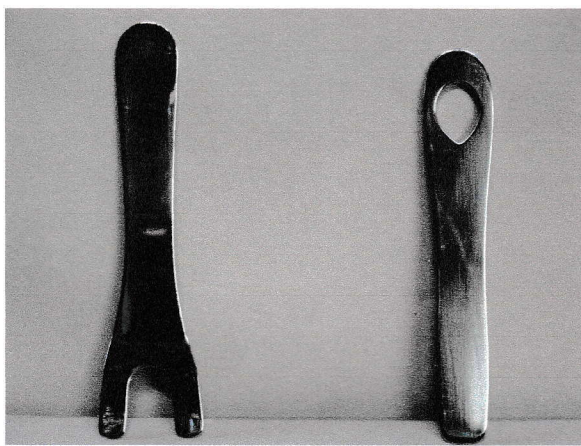

舌圧子電灯(小池式)用 舌圧子耳鼻電灯用

【品目仕様等】

ステンレス板(JIS SUS 304)

【滅菌方法】

(1)使用前に必ず洗浄・乾燥後、オートクレーブで滅菌してください。

[設定条件は 121℃ 1.2kgf/cm² 20分間]

(2)再使用の場合も滅菌が必要である。

【使用上の注意】

(1)使用目的以外での使用はしないで下さい。

(2)使用前に必ず洗浄・滅菌処理をして下さい。

(3)使用時に必要以上の応力負荷をかけますと
変形、破損、部品脱落等の原因となります。
過度の力的負荷をかけないで下さい。

【包装】 50枚(包) 10枚×5(包)

【製造販売業者及び製造業者】

合資会社 勝田金属製作所

〒131-0044

東京都墨田区文花1-6-10

TEL 03-3612-3451

類別(類別名称)/一般的名称

機械器具 52

医療用拡張器/拡張器

一般医療機器

(JMDNコード:11254000)


販売名

耳鼻・舌圧子耳鼻電灯の付属補給用

【禁忌・禁止】

使用期間中本品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造や分解)を加えることは一切行わないで下さい。故障、折損等の原因となります。

【形状・構造等】

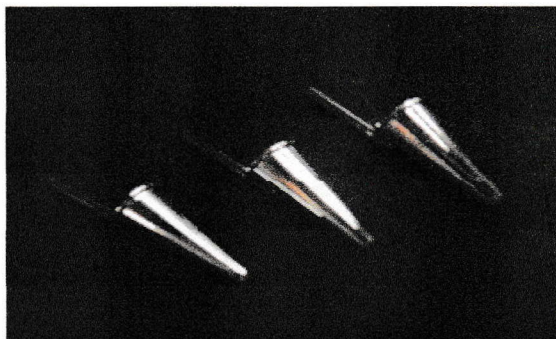

【品目仕様等】

黄銅製クロムメッキ仕上げ(JIS H 8617)

【滅菌方法】

(1)使用前に必ず洗浄・乾燥後、オートクレーブで滅菌してください。

[設定条件は 121℃ 1.2kgf/cm² 20分間]

(2)再使用の場合も滅菌が必要である。

【使用上の注意】

(1)使用目的以外での使用はしないで下さい。

(2)使用前に必ず洗浄・滅菌処理をして下さい。

(3)使用時に必要以上の応力負荷をかけますと
変形、破損、部品脱落等の原因となります。
過度の力的負荷をかけないで下さい。

【包装】 3個(包)

【製造販売業者及び製造業者】

合資会社 勝田金属製作所

〒131-0044

東京都墨田区文花1-6-10

TEL 03-3612-3451

類別(類別名称)/一般的名称

機械器具 52 医療用拡張器/鼻腔拡張器具

一般医療機器 (JMDNコード:11260000)


販売名

鼻鏡・舌圧子耳鼻電灯の付属補給用

【禁忌・禁止】

使用期間中本品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造や分解)を加えることは一切行わないで下さい。故障、折損等の原因となります。

【形状・構造等】

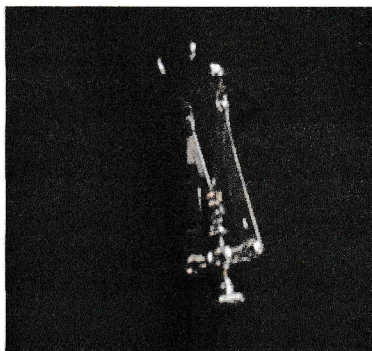

【品目仕様等】

黄銅製クロムメッキ仕上げ(JIS H 8617)

【滅菌方法】

(1)使用前に必ず洗浄・乾燥後、オートクレープで滅菌してください。

[設定条件は 121℃ 1.2kgf/cm² 20分間]

(2)再使用の場合も滅菌が必要である。

【使用上の注意】

(1)使用目的以外での使用はしないで下さい。

(2)使用前に必ず洗浄・滅菌処理をして下さい。

(3)使用時に必要以上の応力負荷をかけますと
変形、破損、部品脱落等の原因となります。
過度の力的負荷をかけないで下さい。

【包装】 1個(包)

【製造販売業者及び製造業者】

合資会社 勝田金属製作所

〒131-0044

東京都墨田区文花1-6-10

TEL 03-3612-3451