

歯科材料 03 義歯床材料  
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン 70832000

## フィットベース

### 【禁忌・禁止】

メタクリレート系ポリマー、メタクリレート系モノマー又は有機溶媒に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

形状:粉材と液材からなる。

成分・分量

構成成分	性状	成分
粉材	粉末	ポリエチルメタクリレート、着色材、その他
液材	液体	メタクリル酸メチル、その他

付属品 粉:トングリキップ 液:計量カップ、スポイト、スパチュラ

### 【使用目的又は効果】

個人トレー及びベースプレート等に用いる。

### 【使用方法等】

- ① 石膏作業模型の粘膜面にレジン分離材を塗布します。
- ② 粉及び液を計量します。標準粉液比は、粉計量カップ目盛15(約10g)に対して、液スポイト目盛4.5(3目盛+1.5目盛、約4.5mL)です。
- ③ 粉を入れたカップ内に液を加え、スパチュラで約20秒混和します。
- ④ 厚さ1.5mm程度のシート状に伸ばして模型に圧接し、硬化する前に床辺縁の余剰分をできるだけカットします。操作可能時間は3~4分です。
- ⑤ 混和開始より20分以上経過後、模型からはずし、床辺縁をバー等で仕上げます。

[使用方法に関連する使用上の注意]

本材は採取後速やかに使用し、液の容器はすぐに密栓すること。

### 【使用上の注意】

#### 1) 重要な基本的注意

- ① 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、腫瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者又は術者においては、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせるか、又は受けること。
- ② 本材が患者の目、皮膚又は衣類に付着しないような措置を講じること。また、適用部位以外の口腔粘膜にはなるべく付着させないこと。
- ③ 本材が万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けさせるか、又は受けること。
- \* ④ 液材が皮膚に付着した場合には、直ちに石鹸を使用し流水で十分洗浄すること。衣類に付着した場合には、直ちにアルコール(綿球)で十分拭き取ること。

#### 2) 不具合・有害事象

本材の使用に伴い、発赤、びらん、水疱、浮腫などの過敏症状が発生することがあります。

#### 3) その他の注意

- ① 本材を使用する際には、必ず医療用(歯科用)手袋及び保護メガネなどを着用し、目、皮膚又は衣類に付着しないよう十分注意すること。なお、医療用(歯科用)手袋は、本材の直接的接触を防ぐが、一部の有機溶媒、モノマーが短時間のうちに浸透することが知られているので、液、粉又は粉液練和物が付着した場合には、直ちに手袋を捨て、石鹸を使用し流水で手を十分洗浄すること。
- ② 本材を使用する際には、適切な換気(1時間当たり数回の換気)がなされている場所で使用すること。
- ③ 液は可燃性のため、火気の近くで使用したり、火気の近くに置いたりしないこと。また、テーブル、床上などにこぼした場合には、すぐに乾いた布でふき取ること。

- ④ 本材の硬化体を研削、研磨する際には、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、火気、高温、多湿又は直射日光を避けて「0~23℃」で保管すること。
- ・同一保管場所に大量に保管しないこと。また、使用及び保管場所には、消火器を備えること。
- ・粉、液ともに必ず蓋をよく締めて保管すること。

[有効期間]

本材は包装に記載の※使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は自己認証(当社データ)による。]

※(例 Exp. '□□, ○○. は使用期限20□□年○○月を示す。)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 亀水化学工業株式会社

電話番号 (フリーダイヤル) 0120-267-720

製造元 亀水化学工業株式会社