

器 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN コード 70469000

FISSO アーム・サポート


【警告】

マッケ社の手術台に適合するアクセサリです。他の手術台に装着する場合は、クランプベースが適合していることを確認すること。
適合しない場合、使用中に外れるおそれがあります。

【形状・構造等及び原理等】

くの字型をした多関節アーム①-②-③が主要機構部分で、それぞれ端にアームボード(腕置き台)とクランプベース(手術台への取付具)が付いている。

多関節アーム中央②のロック・ノブを緩めると①-②-③の関節部が同時に解除され、任意の角度・方向へ回転出来る。アームボードを持って、希望の位置、角度に合わせてロック・ノブを締めると関節①-②-③が、その角度で固定される。オプションでアームボード固定用ベルトが用意されている。

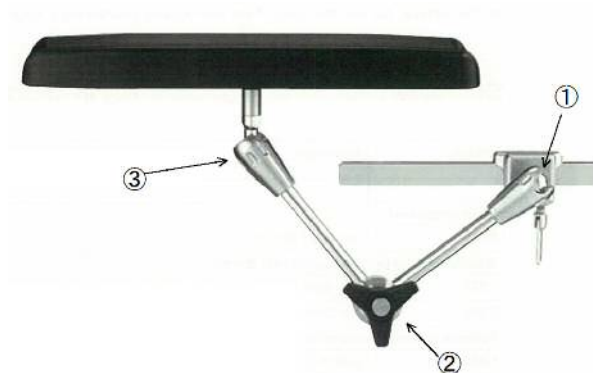


【使用目的又は効果】

手術台に装着するアクセサリである。
高さや傾き調節が可能な腕受け台で、様々な体位に適應する。

材 質: アームボード(腕置き台) PVC 84.5% - PE 15.5%
多関節アーム(機構部分) ステンレス SUS304製
関節間パイプ ステンレス SUS304製 丸パイプ
ロック・ノブ ネジ部ステンレス、ハンドル樹脂整形品
最大荷重: (多関節アームを最大に伸ばした状態で) 6 Kg
製品重量: 4.3kg

【使用方法等】

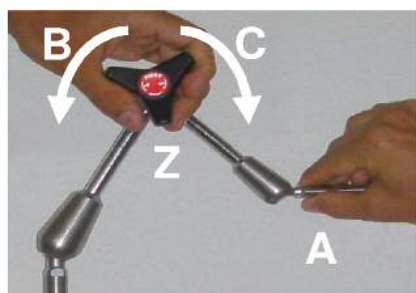

1. 手術台のアクセサリ・レールにクランプベース①により本体を固定する。
2. 片手で多関節アームの前方部(A)を持ち、他方の手でロック・ノブ(Z)を操作してください。
3. 最初に、ロック・ノブ(Z)を必要なだけ左(B方向)に回して多関節アームを解除する。
4. 次に、アームを希望の位置へ動かしてください。
5. その位置を保持して、ロック・ノブ(Z)を右(C方向)に回して締めてください。
6. 最後に、アームがしっかり固定されているか、きちんと機能するか確認して下さい。

【使用上の注意】

使用方法等に関する使用上の注意

クランプベースは、手術台に適合したものを使用してください。マッケシステム以外のレールに装着する場合は、事前に適合するか確認すること。

通常の洗浄、消毒が可能。オートクレーブ滅菌(132℃)は不可。

【保管方法及び使用期間等】

通常の使用で5～7年を使用期間としているが、使用頻度等によっても変化する。

[自己認証(社内データ)による。]

【取扱い上の注意】

使用前に、ロック・ノブがきちんと機能するか確認すること。

【保守・点検に係わる事項】

使用者による点検事項

使用后、ガタツキや外観上の損傷、ゆがみを確認。

業者による保守点検

異常を認めた時に、医療機器修理業者へ依頼して下さい。


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: エア・ウォーター防災株式会社
〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台 3-2-16

TEL 078-992-1400

外国製造業者: Baitella AG スイス

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[販売業者]



取扱説明書を必ずご参照下さい