

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 排液バック 70308000

メイトvac


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.再使用、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 構造

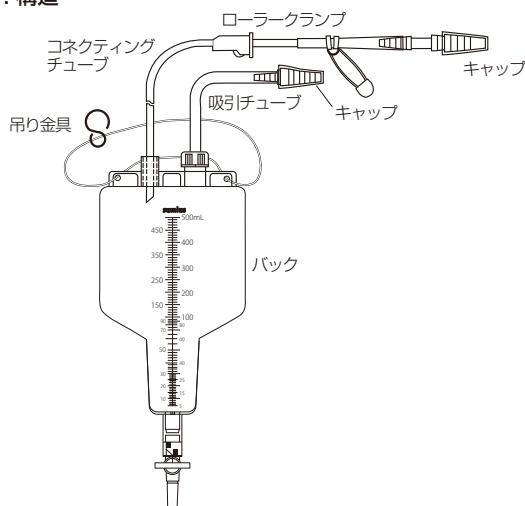

2. 種類

本品の種類は以下の通りである。

品 番	容量 (mL)
MD-63155A	500

※本品はE O G滅菌済である。

3. 作動・動作原理

本品は吸引器と接続して持続的に陰圧をかけ、創部の血液、膿状分泌物などの体液を貯留できる。

【使用目的又は効果】

腹腔ドレーンまたは消化管ドレーンに接続し、腹腔または消化管からの血液、空気、膿状分泌物を除去するために用いるバックである。

【使用方法等】

※本品はコンパクトドレーンユニット（医療機器承認番号：21100BZZ00176000）と組み合わせて使用可能である。

- 1.コンパクトドレーンユニットの添付文書に従い準備を行い、メイトvacの吸引チューブとコンパクトドレーンユニットのコネクティングチューブを接続する。
- 2.患者より低い位置にバックを設置する。
- 3.メイトvacの吸引チューブとコンパクトドレーンユニットのコネクティングチューブ接続ラインからリークがないことを確認したのち、患者ドレーンチューブからクランプを外す。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1.本品を床に落下させたり、その他強い衝撃を加えないこと。破損する可能性がある。

- 2.本品のコネクティングチューブのコネクターの寸法は下図（図1）のとおりである。事前に接続できること、気密確認を行い、接続できないドレーンチューブは使用しないこと。気密性を確保できない、又は使用中に外れる可能性がある。

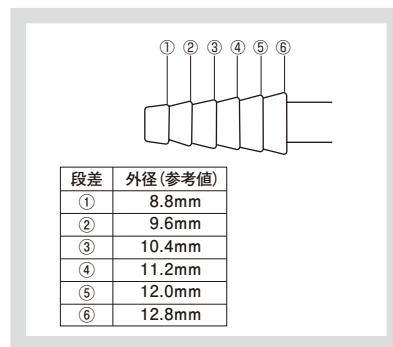


図 1

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

本品の使用にともない、以下の不具合・有害事象が生じる可能性がある。

【重大な不具合】

- ・接続部からの漏れ（排気・排液漏出）

【重大な有害事象】

- ・逆行性感染

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管条件

- 1)本品は直射日光や水濡れを避け、涼しい場所で保管すること。
- 2)ケースに収納した状態で保管すること。

2. 有効期間

本品の滅菌保証期間は製造後3年間とする。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

S B カワスミ株式会社

【お問い合わせ先電話番号】

東京	03-5462-4824	大阪	06-7659-2156
札幌	0133-60-2400	名古屋	052-726-8381
仙台	022-742-2471	広島	082-542-1381
北関東	0495-77-2621	福岡	092-624-0123