


機械器具 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

S E チューブ


【形状・構造及び原理等】

1. 構造

ソフトタイプ、ハードタイプ

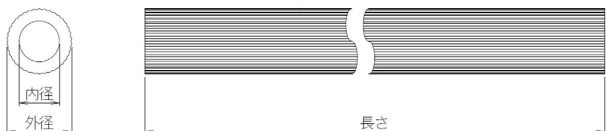

ハードタイプ外周スジなし

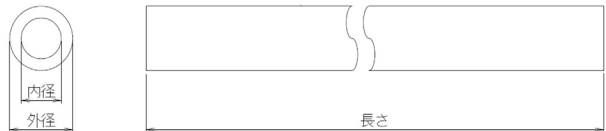

2. 種類

本品は構成内容により以下の種類がある。

製品番号	タイプ	チューブ サイズ 内径×外径 (mm)	長さ (m)	材質
MT-41110	ソフト タイプ	7.0×11.0	30	軟質ポリ塩化 ビニル樹脂（可 塑剤：フタル酸 ジ（2-エチル ヘキシル））
MT-41115		5.0×9.0	50	
MT-41120		8.0×13.0	20	
MT-91010	ハード タイプ	7.0×11.0	30	スチレン系熱 可塑性エラス トマー
MT-91020		8.0×13.0	20	
MT-91015	ハードタイプ 外周スジなし	7.0×11.0	30	

※本品は未滅菌である。オートクレーブ対応である。

【使用目的又は効果】

浸出液等を吸引により除去する際に、吸引器と回収容器又は排
液用チューブと回収容器との接続に用いるプラスチック製の
チューブである。

【使用方法等】

- 用途に合わせ本品を必要な長さに切断する。
- 本品を各種器具やチューブに緩みや外れが無いように接続する。
- 本品は下記の範囲内にてオートクレーブが可能である。
ハードタイプ：132℃以下、20 分以下
ソフトタイプ：121℃以下、20 分以下

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 接続部への体液や薬液等の付着に注意すること。[接続部のゆ
るみ等が生じ気密性を確保できない、又は使用中に外れる可
能性がある。]
- 使用中は本品の破損、キンク、接続部のゆるみや漏れ、詰まり
等がないことを確認すること。
- 本品を鋭利なもので傷をつけないこと。[気密不良、液漏れの
可能性がある。]
- 本品に排液を滞留させないこと。[排液が凝固し、吸引できな
くなる可能性がある。]

- オートクレーブの際は、チューブの上に他の物を載せないこと。
[変形の可能性がある。]
- オートクレーブ後、白く変色しても使用に影響はない。
- オートクレーブを行う際は【使用方法等】欄に記載した範囲内
にて実施すること。

【使用上の注意】

- 不具合・有害事象
[その他の不具合]
 - 気密不良
 - 変形、破損、閉塞、接続外れ

【保管方法及び有効期間等】

- 保管条件
 - 1)本品は直射日光および水濡れを避け、涼しい場所で保管する
こと。
 - 2)ケースに収納した状態で保管すること。
- 有効期間
製造後 5 年間とする。（自己認証（当社データによる））

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】
S B カワスミ株式会社

【お問い合わせ先電話番号】

東京	03-5462-4824	大阪	06-7659-2156
札幌	0133-60-2400	名古屋	052-726-8381
仙台	022-742-2471	広島	082-542-1381
北関東	0495-77-2621	福岡	092-624-0123