

機械器具 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

コネクター付コネクティングチューブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】
1.使用方法
再使用、再滅菌禁止

本品はE O G滅菌済みである。
材質 チューブ：軟質ポリ塩化ビニル樹脂（可塑剤：フタル酸ジ（2－エチルヘキシル））

【使用目的又は効果】
浸出液等を吸引により除去する際に、吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器との接続に用いるプラスチック製のチューブである。

【形状・構造及び原理等】


①メス－メスタイプ

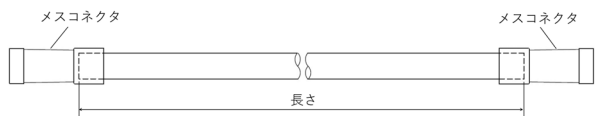

製品番号	コネクタ	チューブサイズ 内径(mm)×外径(mm)	長さ (m)
MT-1701W	メス－メス	6.5×10.0	1.8
MT-1702W			3.0
MT-1703W		5.0×8.5	1.8
MT-1704W			3.0

※メスコネクタ内径（参考値）：6～7mm

②オス－メスタイプ

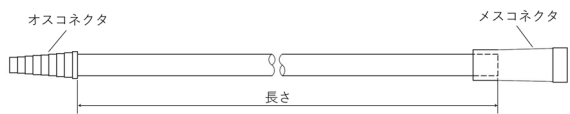


製品番号	コネクタ	チューブサイズ 内径(mm)×外径(mm)	長さ (m)
MT-1711W	オス（大）－メス	6.5×10.0	1.8
MT-1712W			3.0
MT-1713W	オス（小）－メス	5.0×8.5	1.8
MT-1714W			3.0

※オスコネクタ外径（参考値）：オス（大）6～11mm、オス（小）6～9.5mm

※メスコネクタ内径（参考値）：6～7mm


③オスルアー－メスタイプ

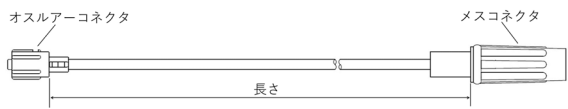

製品番号	コネクタ	チューブサイズ 内径(mm)×外径(mm)	長さ (m)
MT-1730W	オスルアー－メス	2.8×4.0	0.5

※メスコネクタ内径（参考値）：6～6.7mm

④オス－メスタイプ

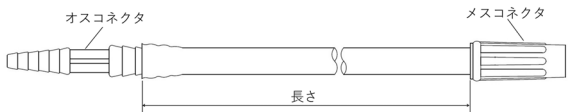

製品番号	コネクタ	チューブサイズ 内径(mm)×外径(mm)	長さ (m)
MT-1751W	オス－メス	6.5×10.0	0.5

※オスコネクタ外径（参考値）：6.6～11mm

※メスコネクタ内径（参考値）：6～6.7mm

【使用方法等】

- 接続する各種の機器類やチューブの径、及び必要な距離とコネクタを確認し、対応した本品を選択する。
- 本品を各種器具やチューブに緩みや外れが無いように接続する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 接続部への体液や薬液等の付着に注意すること。[接続部のゆるみ等が生じ気密性を確保できない、又は使用中に外れる可能性がある。]
- 使用中は本品の破損、キンク、接続部のゆるみや漏れ、詰まり等がないことを確認すること。
- 本品を鋭利なもので傷をつけないこと。[気密不良、液漏れの可能性がある。]
- 本品に排液を滞留させないこと。[排液が凝固し、吸引できなくなる可能性がある。]

【使用上の注意】

- 不具合・有害事象
[その他の不具合]
 - ・気密不良
 - ・変形、破損、閉塞、接続外れ

【保管方法及び有効期間等】

- 保管条件
 - 1)本品は直射日光および水濡れを避け、涼しい場所で保管すること。
 - 2)ケースに収納した状態で保管すること。
- 有効期間
本品の保証期間は製造後 3 年間とする。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】
S B カワスミ株式会社

【お問い合わせ先電話番号】

東京	03-5462-4824	大阪	06-7659-2156
札幌	0133-60-2400	名古屋	052-726-8381
仙台	022-742-2471	広島	082-542-1381
北関東	0495-77-2621	福岡	092-624-0123