


機械器具 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

テーパーチューブ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

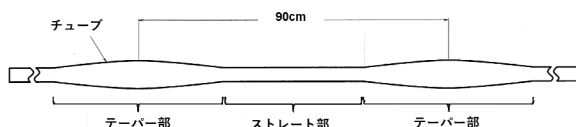

本品は 90cm 間隔で膨らみがあり、チューブの切断箇所によって必要なチューブ内外径を得ることができる。本品は無滅菌である。

2. 種類

本品は構成内容により以下の種類がある。

製品番号	内径 (mm)		外径 (mm)		長さ (m)
	ストレート部	テーパー部 最大径	ストレート部	テーパー部 最大径	
MT-12000	7.0	10.6	9.7	14.7	30
MT-12100	4.8	8.2	7.1	11.3	

※材質 チューブ：軟質ポリ塩化ビニル樹脂（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））

【使用目的又は効果】

浸出液等を吸引により除去する際に、吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器との接続に用いるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

1. 本品を接続先の径に合わせた箇所で切断する。
2. 必要な長さに切断し、各種器具やチューブに緩みや外れが無いように接続する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 接続部への体液や薬液等の付着に注意すること。[接続部のゆるみ等が生じ気密性を確保できない、又は使用中に外れる可能性がある。]
2. 使用中は本品の破損、キンク、接続部のゆるみや漏れ、詰まり等がないことを確認すること。
3. 本品を鋭利なもので傷をつけないこと。[気密不良、液漏れの可能性がある。]
4. 本品に排液を滞留させないこと。[排液が凝固し、吸引できなくなる可能性がある。]
5. オートクレーブはできない。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象
[その他の不具合]
 - ・ 気密不良
 - ・ 変形、破損、閉塞、接続外れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管条件
 - 1) 本品は直射日光および水濡れを避け、涼しい場所で保管すること。
 - 2) ケースに収納した状態で保管すること。

2. 有効期間

製造後 5 年間とする。（自己認証（当社データによる））

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]
S B カワスミ株式会社

【お問い合わせ先電話番号】

東京	03-5462-4824	大阪	06-7659-2156
札幌	0133-60-2400	名古屋	052-726-8381
仙台	022-742-2471	広島	082-542-1381
北関東	0495-77-2621	福岡	092-624-0123