

機械器具 36 医療用ピンセット
管理医療機器 単回使用ピンセット 35079002

単回使用滅菌ピンセット

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再滅菌禁止。
- 再使用禁止。
- 体内に留置しないでください。
- 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となりますので絶対に行わないでください。
- 電気メスと直接接触させないでください。〔火傷や感電の恐れがあります。〕

2. 使用期限（耐用期間）

使用期限(自己認証)をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

【 形状・構造及び原理等 】

1. 形状・構造



（図は製品の一例を示す。）

2. 原材料

- ステンレス

3. 原理

- 本品はステンレス製のピンセットであり、グリップ部を握り先端の把持部で物体を把持します。

【 使用目的又は効果 】

- 医療用の単回使用ピンセットとして、保持する物体を閉じて挟むために用います。

【 使用方法等 】

1. 基本操作

本品はグリップ部を握り、先端の把持部で物体を把持して使用すること。

2. 使用後の処置

医療施設等によって定められた適切な方法で廃棄すること。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 包装が破損、汚染していたり、本品に異常が見られるものは使用しないでください。
- 使用中に付着した血液や組織片は局方滅菌精製水を浸したリントフリークロス of 柔らかい布でこまめに清拭してください。
- 開封し、使用しなかったものを再滅菌して使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

1. 保管方法

直射日光、水ぬれ、火気及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。