

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000

滅菌サージカルパッド

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は脱脂綿等の吸収材を組み合わせ、ガーゼで被覆成型した創傷面保護パッドで滅菌済みのものです。
表面材：ガーゼ
吸収材：脱脂綿、セルロース
防水材：セルロース、ポリプロピレン

【 使用目的又は効果 】

- 創傷を被覆するために用いる、柔らかくふわふわした綿状の塊から成るパッドです。

【 使用方法等 】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

【 使用上の注意 】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 識別糸のない面を創傷面に当て使用してください。
- 開封した残品は創傷面に使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

1、保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

2、使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）
（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）