

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

滅菌綿球（紐付）

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【使用方法】

- 紐が切れるおそれがありますので強く引っ張らないでください。
- 紐を切り取って使用しないでください。

【 形状、構造及び原理等 】

- 本品は綿 100%脱脂綿を球状に丸め、表面を毛羽防止加工し紐を付けた滅菌済みのものです。

【 使用目的又は効果 】

- 様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊です。

【 使用方法等 】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

【 使用上の注意 】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 紐が切れ綿球が取れなくなった場合は直ちに医師による適切な処置を受けてください。
- 開封した残品は創傷面に使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

1、保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

2、使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）
（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）