

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

## 滅菌デクーゼ®

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

#### 【形状・構造及び原理等】

- 本品は綿100%の平織りガーゼで滅菌済みのものです。
- 本品は白い布で臭い及び味はありません。

#### 【使用目的又は効果】

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とするガーゼから成る材料です。

#### 【使用方法等】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

#### 【使用上の注意】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 開封した残品は創傷面に使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。
- ガーゼに電気メス等を近づけると、引火するおそれがあるので、注意して使用してください。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管してください。

##### 2. 使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

®：登録商標