

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

ケーパイン®

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。
- 滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG滅菌を使用してください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は綿 100%の平織りガーゼを折り畳んだものです。
- 本品には切り込みのあるタイプもあります。
- 本品は白い布で臭い及び味はありません。

【 使用目的又は効果 】

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とするガーゼから成る材料です。

【 使用方法等 】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。
- 創傷面については滅菌したものを使用してください。
（別売りで滅菌ケーパインもあります。）

【 使用上の注意 】

- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。
- ガーゼに電気メス等を近づけると、引火するおそれがあるので、注意して使用してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

®：登録商標