

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000
ラップスポンジ

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。
- 滅菌して使用する場合は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌を使用してください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は積層したガーゼに綿テープ及びX線不透視板を縫製し表面をクレープ状に加工したものです。
ガーゼ、綿テープ、縫い糸：綿 100%
X線不透視板 固定材：ポリ塩化ビニル
造影剤：硫酸バリウム
着色剤：青色顔料
(ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを使用しています。)

【 使用目的又は効果 】

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具です。

【 使用方法等 】

- 滅菌して使用目的に応じて適宜使用してください。
(別売りで滅菌ラップスポンジもあります。)

【 使用上の注意 】

- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 本品のX線不透視板から、可塑剤の溶出する可能性があります。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）
(10:00~17:00 月~金ただし祝祭日を除く)