

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 X 線造影材入リスポンジ 13705000

合わせガーゼ X

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。
- X 線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存する可能性がありますので、X 線造影系部分以外の箇所を挟んで使用してください。
- 滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌を使用してください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は X 線造影系を織り込んだガーゼと積層したガーゼを縫い合わせたものです。
ガーゼ、縫い糸 : 綿 100%
X 線造影系 固定材: ポリプロピレン・ポリエステル
造影剤: 硫酸バリウム
着色剤: 青色顔料

【 使用目的又は効果 】

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X 線で検知可能な成分を含有する器具です。

【 使用方法等 】

- 滅菌して使用目的に応じて適宜使用してください。
(別売りで滅菌合わせガーゼ X もあります。)

【 使用上の注意 】

- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

【 製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元: 川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956 (お客様相談窓口)
(10:00~17:00 月~金ただし祝祭日を除く)