

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000
柄付ガーゼX

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。
- X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存する可能性がありますので、X線造影糸部分以外の箇所を挟んで使用してください。
- 滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG滅菌を使用してください。

【形状・構造及び原理等】

- 本品はX線造影糸を織り込んだガーゼと積層したガーゼを縫製し、綿テープを縫い合わせたものです。
ガーゼ、綿テープ、縫い糸：綿 100%
X線造影糸 固定材：ポリプロピレン・ポリエステル
造影剤：硫酸バリウム
着色剤：青色顔料

【使用目的又は効果】

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具です。

【使用方法等】

- 滅菌して使用目的に応じて適宜使用してください。
(別売りで滅菌柄付ガーゼXもあります。)

【使用上の注意】

- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）
（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）