

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 X 線造影材入りスポンジ 13705000

カ イ メ ン

再使用禁止

滅菌済

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品はセルローススポンジに X 線造影材を組み合わせたものです。
- 本品は形状維持のためのプラスチック容器に入っています。
スポンジ : セルロース100%
X 線造影材 固定材 : ポリプロピレン・ポリエステル
造影剤 : 硫酸バリウム
着色剤 : 青色顔料

【 使用目的又は効果 】

- 液の吸収、出血の抑制、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、身体の内部構造に適用することを目的とする、X 線で検知可能な成分を含有する器具です。

【 使用方法等 】

- 本品は無菌的に包材から取り出し、内視鏡外科手術で使用してください。

吸液目的に使用する場合

- 1) 本品をケースから取り出す。
- 2) 内径12mm以上のトロカールから体腔内に挿入する。
- 3) 膨潤させずに適切な位置に配置し、血液、体液などの吸液目的で使用する。
- 4) 2～3cm以上の切開部を確保し、破断しないように注意して本品を体腔内から抜去する。

臓器の保護目的に使用する場合

- 1) 本品をケースから取り出す。
- 2) 内径12mm以上のトロカールから体腔内に挿入する。
- 3) 挿入後、生理食塩液にて膨潤させ、臓器の保護に使用する。
- 4) 2～3cm以上の切開部を確保し、破断しないように注意して本品を体腔内から抜去する。

【 使用上の注意 】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品は手技に精通している医師が使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 電気メス等を近づけると、引火したり、X 線造影材が剥がれるおそれがあるので、注意して使用してください。
- 本品を使用する場合は、内径 12mm 以上のトロカールを使用してください。
- 本品を手や鉗子、ピンセット等で強く引っ張らないでください。
- 膨潤させる際は必ず生理食塩液を使用してください。
- 使用前、使用中に関わらず本品を切る等の加工はしないでください。
- 体腔内への無理な挿入や抜去、器具類を使用しての粗雑な扱い、鉗子で薄く小さくつかむなどは、本品の破断の原因となるので、注意して使用してください。

- 本品を体外に抜去するときは、2～3cm以上の切開部を確保し、破断しないように注意して本品を体腔内から抜去してください。
- 開封し、使わなかったものは使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意して処理してください。
- 臓器の保護目的に使用する場合は、必ず体腔内で膨潤させてから使用してください。[体腔内へ挿入する前に膨潤させると挿入できなくなります。]

【 保管方法及び有効期間等 】

1. 保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

2. 使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）