

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 X 線造影材入りスポンジ 13705000

エ ン ド サ ポ ー ト

再使用禁止

滅菌済

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品はセルロースのスポンジに X 線造影材を組み合わせたものです。
スポンジ : セルロース 100%
X 線造影材 固定材: ポリプロピレン・ポリエステル
造影剤: 硫酸バリウム
着色剤: 青色顔料
縫製糸 : ポリエステル

【 使用目的又は効果 】

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、身体の内臓構造に適用することを目的とする、X 線で検知可能な成分を含有する器具です。

【 使用方法等 】

- 本品は無菌的に包材から取り出し、内視鏡外科手術で使用してください。
- 体腔内へ挿入後、生理食塩液にて膨潤させてから使用してください。

<使用方法>

- 1) 内径12mm以上のトロカールから体腔内に挿入する。
- 2) 生理食塩液をかけて膨潤させる。
- 3) 臓器の保護や液の吸収に使用し、手術を行う。
- 4) 本品を体外に抜去するときは、下図の部分を把持して、内径12mm以上のトロカール、または切開創から破断しないように注意して取り出す。



【 使用上の注意 】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品は手技に精通している医師が使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 電気メス等を近づけると、引火したり、X 線造影材が剥がれるおそれがあるので、注意して使用してください。
- 本品を使用する場合は、内径 12mm 以上のトロカールを使用してください。
- 使用前、使用中に関わらず本品を切る等の加工はしないでください。

- 体腔内への無理な挿入や抜去、器具類を使用時の粗雑な扱い、鉗子で薄く小さくつかむなどは、本品の破断の原因となるので、注意して使用してください。
- 本品を体外に抜去するときは、内径12mm以上のトロカール、または切開創から破断しないように注意して取り出してください。
- 本品を手や鉗子、ピンセット等で強く引っ張らないでください。
- 膨潤させる際は必ず生理食塩液を使用してください。
- 開封し、使わなかったものは使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意して処理してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

1. 保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

2. 使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）
（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）