

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

GGアブソーテック®（プラス）

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再滅菌、再使用禁止


使用方法

- 体内に留置しないこと。[再手術の可能性があります。]
- 本品を切らないでください。[X線造影糸が付いていない破片が切開創に入ることがあります。このような破片を検出できずに残したままにすると、異物反応を起こす場合があります。]

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は染色した綿製のガーゼを折り畳み、X線造影糸と縫い糸で縫製、もしくは、X線造影糸を挿入して縫い糸で縫製したものです。

(代表図)

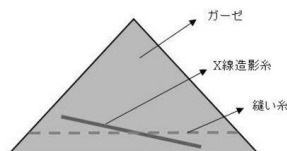

ガーゼ、縫い糸：綿 100%
着色剤：青色染料、黄色染料
(但し、縫い糸は染色しないものもある)
X線造影糸 固定材：ポリプロピレン・ポリエステル
造影剤：硫酸バリウム
着色剤：青色顔料

【 使用目的又は効果 】

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、身体の内臓構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具です。

【 使用方法等 】

- 本品を無菌的に包材から取り出し、内視鏡外科手術で使用してください。
- 使用目的に応じて適宜使用してください。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 包装が破損、汚染していたり、本品に異常が見られるものは使用しないでください。
- 体腔内への無理な挿入及び取り出しや、器具類を使用時の粗雑な扱い等は、破断の原因となるので注意して使用してください。
- 本品の取り出し後に欠損や破損がないことを確認してください。もし、不具合が発生した場合には、体内から速やかに取り除いてください。
- 本品を鉗子等で掴む際は、臓器等を傷つけないようご注意ください。

- 閉創前にレントゲン撮影などで本品を体外に取り出したことを確認してください。
- X線造影糸部分を直接挟んで使用しないでください。[切断又は抜け落ちて体内遺残する恐れがあります。]
- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 開封し、使わなかったものは使用しないでください。

【 使用上の注意 】

1. 重要な基本的注意

- 本品を使用する場合は、内径 12mm 以上のトロカールを使用してください。
なお、適合表はあくまで目安ですので、使用前に使用するトロカールとの適合性を十分確認の上、使用してください。

	ガーゼ形状	
	三角形 大	三角形 小
適合トロカールサイズ	12mm 以上	12mm 以上

- 本品をトロカールを通して体内に挿入もしくは取り出す際、過度の抵抗等の異常を感じた場合は無理に続けず、操作を中止して、始めからやり直してください。[本品が破損する恐れがあります。]
- 本品を使用する際は、予め、併用するトロカールの適合性を充分に確認の上、使用してください。[本品が破損する恐れがあります。]
- 本品に電気メス等を近付けないでください。[切断又は引火する恐れがあります。]
- 使用後、体内残留していない事を確認してください。

2. その他の注意

- 本品は X 線造影糸が付いていますが、患者の状態によっては正面からの撮影で見えにくい場合があるので、確認が不十分の場合には、側面からの撮影やイメージによる撮影を併用してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

1. 保管方法

直射日光、水ぬれ、火気及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

2. 使用期限（耐用期間）

使用期限(自己認証)をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

®：登録商標