

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

緑色柄付ガーゼ

再使用禁止

滅菌済

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）
（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

【形状・構造及び原理等】

- 本品は着色したガーゼを積層し、綿テープ及びX線不透視板を縫製した滅菌済みのものです。
ガーゼ、縫い糸 : 綿
着色料：青色染料、黄色染料
（但し、着色しないものもある）
綿テープ : 綿
X線不透視板 固定材：ポリ塩化ビニル
造影材：硫酸バリウム
着色料：青色顔料
（ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸-2-エチルヘキシルを使用しています。）

【使用目的又は効果】

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具です。

【使用方法等】

- 本品を無菌的に包材から取り出して使用してください。
- 使用目的に応じて適宜使用してください。

【使用上の注意】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 本品を切る等の加工はしないでください。
- ガーゼに電気メス等を近づけると、引火するおそれがあるので、注意して使用してください。
- 本品を長時間臓器と接触させないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意して処理してください。
- 開封し、使わなかったものは使用しないでください。
- 本品のX線不透視板から、可塑剤が溶出する可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

1、保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管してください。

2、使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。