

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 X 線造影材入リスポンジ 13705000  
**合わせガーゼ R F**

**再使用禁止****【 禁忌・禁止 】**

- 再滅菌、再使用禁止

**使用方法**

- 体内に留置しないでください。[再手術の可能性がありま  
す。]
- 本品を切る等の加工はしないでください。[X 線造影系又  
は RF タグが付いていない破片が切開創に入ることがあ  
ります。このような破片を検出できずに残したままにす  
ると、異物反応を起こす場合があります。]

**【 形状・構造及び原理等 】**

- 本品は X 線造影系を織り込んだガーゼと積層したガーゼ  
を縫製し、RF タグを装着した滅菌済みのものです。  
ガーゼ、縫い糸 : 綿  
X 線造影系 固定材: ポリプロピレン、ポリエステル  
造影剤: 硫酸バリウム  
着色材: 青色顔料  
RF タグ 基材: ポリエステル  
IC チップ: ケイ素  
アンテナ: アルミニウム  
二次加工フィルム : ポリウレタン

**【 使用目的又は効果 】**

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官  
の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に  
適用することを目的とする、X 線で検知可能な成分を含有  
する器具です。
- ガーゼカウント装置及び体内探索アンテナを用いて検知  
可能な器具です。

**【 使用方法等 】**

- 使用目的に応じて適宜使用してください。
- ガーゼカウント装置及び体内探索アンテナを用いて検知  
するために本品を使用前に登録してください。
- 本品は無菌的に包材から取り出して使用してください。

**【使用方法等に関連する使用上の注意】**

- 包装が破損、汚染していたり、本品に異常が見られるもの  
は使用しないでください。
- 開封後は直ちに使用してください
- 破損の恐れがあるため、鉗子等の器具で本品を把持する場  
合には、RF タグを避けてください。
- X 線造影系及び RF タグを手や鉗子、ピンセット等で強く  
引っ張らないでください。
- RF タグをこする、押し当てる等、強い衝撃を加えないで  
ください。
- 各種コードをまとめるのに本品を使用しないでください。
- 電気メス・レーザー・超音波等の高エネルギー体と直接接  
触すると引火や、X 線造影系及び RF タグが破損又は脱落  
する恐れがあるため注意して使用してください。
- 磁気共鳴システム (MRI) の管理区域内で使用しないでく  
ださい。[MRI で発生する磁気及び電磁波により内臓され  
ているデータが損失する可能性や、強い磁力により RF タ  
グの移動、高周波磁界により発熱する恐れがある。]

- 他社の製品を用いて RF タグの検知をすることはできませ  
ん。
- 埋め込み型医療機器（ペースメーカー等）を装着している  
患者には探索アンテナによるガーゼ探索は実施しないでく  
ださい。
- 開創前に体内探索装置やレントゲン撮影などで本品を体  
外に取り出したことを確認してください。
- 開封し、使わなかったものは使用しないでください。

**【 使用上の注意 】**

1. 重要な基本的注意
  - 本品に電気メス等を近付けないでください。[切断又は引  
火する恐れがある。]
  - 使用後、体内に残留していない事を確認してください。
2. その他の注意
  - 本品は X 線造影系が付いていますが、患者の状態によっ  
ては正面からのレントゲン撮影で見えにくい場合があるの  
で、確認が不十分の場合には、側面からの撮影やイメージ  
による撮影を併用してください。

**【 保管方法及び有効期間等 】**

1. 保管方法
  - 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な  
場所に保管してください。
2. 使用期限(耐用期間)
  - 使用期限(自己認証)を袋に記載しています。

**【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】**

製造販売元: 川本産業株式会社  
TEL 06-6943-8956 (お客様相談窓口)  
(10:00~17:00 月~金ただし祝祭日を除く)