

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

商 影 XW

再使用禁止

**【 禁忌・禁止 】**

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。
- X線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存する可能性があるため、X線造影系部分以外の箇所を挟んで使用してください。
- 滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG滅菌を使用してください。

**【 形状・構造及び原理等 】**

- 本品はガーゼにX線造影系を織り込んだものです。  
ガーゼ : 綿 100%  
X線造影系 固定材: ポリプロピレン・ポリエステル  
造影剤: 硫酸バリウム  
着色剤: 青色顔料

**【 使用目的又は効果 】**

- 出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料です。X線を検知できる成分を用いています。

**【 使用方法等 】**

- 滅菌して使用目的に応じて適宜使用してください。  
(別売りで滅菌商影XWもあります。)

**【 使用上の注意 】**

- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。
- ガーゼに電気メス等を近づけると、引火したり、X線造影系が切れたりするおそれがあるので、注意して使用してください。

**【 保管方法及び有効期間等 】**

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

**【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】**

製造販売元: 川本産業株式会社  
TEL 06-6943-8956 (お客様相談窓口)  
(10:00~17:00 月~金ただし祝祭日を除く)