

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 X 線造影材入りガーゼ 32374000

滅菌タンポンガーゼ X

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。
- X 線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存する可能性があるため、X 線造影系部分以外の箇所を挟んで使用してください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品はガーゼに X 線造影系を織り込んだ滅菌済みのものです。
ガーゼ : 綿 100%
X 線造影系 固定材 : ポリプロピレン・ポリエステル
造影剤 : 硫酸バリウム
着色剤 : 青色顔料

【 使用目的又は効果 】

- 出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料です。X 線を検知できる成分を用いています。

【 使用方法等 】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

【 使用上の注意 】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 開封した残品は創傷面に使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。
- ガーゼに電気メス等を近づけると、引火したり、X 線造影系が切れたりするおそれがあるので、注意して使用してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

1、保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

2、使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元 : 川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）
（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）