

医 04 整形用品
一般医療機器 X 線造影材入りガーゼ 32374000
滅菌セミ商影 XW

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないこと。
- 体内に留置しないこと。
- X 線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存する可能性があるため、X 線造影系部分以外の箇所を挟んで使用すること。

【 形状・構造及び原理等 】

● 概要

本品は X 線造影材を織り込まれた滅菌済みのガーゼである。

ガーゼ : セルロース

X 線造影系 固定材 : ポリプロピレン、ポリエステル

造影剤 : 硫酸バリウム

着色剤 : 青色顔料

【 使用目的又は効果 】

- 出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥若しくは汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿製の薬品を含まない吸収材料である。X 線を検知できる成分を含む。

【 使用方法等 】

- 使用目的に応じ、適宜使用する。

【 使用上の注意 】

- 開封した残品は創傷面に使用しないこと。
- ガーゼに電気メス等を近づけると、引火したり、X 線造影系が切れたりするおそれがあるので、注意して使用すること。

***【 保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載している。

***【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】**

製造販売業者 : 川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956 (お客様相談窓口)

(10 : 00~17 : 00 月~金ただし祝日を除く)