

機械器具 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

滅菌舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【形状・構造及び原理等】

（形状、構造）

- 本品は竹を細長い板状に加工し滅菌したものです。
（代表図）



（原理）

- 平らな部分を用いて舌を移動させる。

【使用目的又は効果】

- 舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具です。

【使用方法等】

- 包装から本品を取り出す。
- 口腔内に挿入し、舌を移動させるために使用する。

※【使用上の注意】

- 包装が破損、汚染している場合、使用しないでください。
- 本品は天然産物のため、輸送、保管中の環境などにより、割れ、欠け、ささくれ等が生じることがあります。その場合は使用しないでください。
- 折れたり手に刺さる恐れがあるため、机などに押し当てて開封しないでください。
- 破損する可能性があるため、過度な力で押さえないでください。
- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品を開封し保管したものは滅菌品として使用しないでください。
- 再滅菌しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

1、保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

2、使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝日を除く）